



# Brukerveiledning - kortversjon

## Dynamo talemaskin



Dynamo talemaskin:

bestillingsnr.: ACC-DMOWIN

### INNHOLD

Starte Dynamo.....	2
Stenge Dynamo .....	2
Lade batteriet .....	2
Justere volumet .....	2
Justere vinkelen på kontrollpanelet .....	3
Lag en ny side .....	3
Redigere en side.....	3
Ta opp en melding.....	3
Endre knappers egenskaper.....	4
Litt om passord.....	4
Sikkerhetskopiering.....	4

**GEWA AS**

Postboks 626, 1411 KOLBOTN  
Besøksadresse: Trollåsveien 8  
Telefon: 66 99 60 00  
Telefax: 66 80 94 90  
Teksttelefon: 66 80 93 90  
E-post: gewa@gewa.no  
Website: www.gewa.no



# Brukerveiledning - kortversjon

## Starte Dynamo

- Trykk ned **Av/På** knappen i det øvre høyre hjørnet av enheten.
- Den grønne LED indikatoren lyser et øyeblikk og displayet starter.
- Siden som var sist i bruk kommer opp.

## Stenge Dynamo

Du kan stenge på tre måter:

- Trykk ned **Av/På** knappen i høyre hjørnet.  
Beskjeden ”Er du sikker” kommer opp.  
Trykk **Ja**.
- Trykk på **Innstilling** knappen på kontrollpanelet.  
Trykk på ”Slå av maskinen” i **Innstilling** menyen.  
Beskjeden ”Er du sikker” kommer opp.  
Trykk **Ja**.
- Det er også mulig å lage en knapp på alle sider som slår av maskinen. Følg da fremgangsmåten beskrevet ovenfor.

## Lade batteriet

På kontrollpanelet er det en batteri-indikator. Denne viser til enhver tid hvor mye strøm som er igjen. Når batteriet blir svakt, begynner ”T” på indikatoren å blinke. Når batteriet er helt tomt, slås enheten av automatisk.

For å lade batteriet, må enheten slås av før ladingen tar til. Trykk deretter ladepluggen inn i egnet hull på enhetens høyre side. Kople deretter laderen til nettet med stikk-kontakten. En gul indikator (LED) begynner å lyse. Når denne slukker er enheten ladet opp. (Full lading tar ca 3 timer.)

## Justere volumet

1. Trykk på **Innstilling** på kontrollpanelet.
2. Trykk på **Høyttaler-innstillinger**.
3. Trykk på **høyere** eller **lavere** for å justere.
4. Trykk på **OK**.
5. Trykk på **OK**.

## GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN  
Besøksadresse: Trollåsveien 8  
Telefon: 66 99 60 00  
Telefax: 66 80 94 90  
Teksttelefon: 66 80 93 90  
E-post: gewa@gewa.no  
Website: www.gewa.no



# Brukerveiledning - kortversjon

## Justere vinkelen på kontrollpanelet

1. Trykk på kontrollpanelets **Innstillingsknapp**.
2. Trykk på **Skjerm-kontroll**.
3. Trykk på **Opp** eller **Ned** for å endre panelets vinkel.
4. Trykk **OK**.
5. Trykk **OK**.

## Lag en ny side

1. Trykk på kontrollpanelets **innstillingsknapp**.
2. Trykk **Lag ny side**.
3. Trykk **Mer** eller **Færre** for å angi antall rader.
4. Trykk **Mer** eller **Færre** for å angi antall kolonner.
5. Trykk **Skriftstørrelse** til ønsket størrelse vises.
6. Trykk på **Legg til samlelinje** (beskjedvindu) til ønsket innstilling vises.
7. Trykk **OK**.
8. Skriv et navn på den nye siden.
9. Trykk **OK** for å avslutte innstillingen.
10. Den nye siden vises.

## Redigere en side

1. Trykk på kontrollpanelets **Innstillingsknapp**.
2. Trykk **Sideleser**.
3. Bruk **Rull**-knappen eller **Sidesøk** for å finne og markere siden du vil endre.
4. Trykk på **Rediger markert side**.
5. Trykk **Mer** eller **Færre** for å angi antall kolonner.
6. Trykk **Skriftstørrelse** til ønsket størrelse vises.
7. Trykk på **Legg til Samlelinje** (beskjedvindu) til ønsket innstilling vises.
8. Trykk **OK**. Siden vises.

## Ta opp en melding

1. Trykk på kontrollpanelets **Opptak** knapp.
2. Trykk på den knapp du vil kople en melding til.
3. Når du slippet knappen starter opptaket. Snakk tydelig i mikrofonen.
4. Trykk på knappen igjen for å avslutte opptaket.

**GEWA AS**

Postboks 626, 1411 KOLBOTN  
Besøksadresse: Trollåsveien 8  
Telefon: 66 99 60 00  
Telefax: 66 80 94 90  
Teksttelefon: 66 80 93 90  
E-post: gewa@gewa.no  
Website: www.gewa.no



# Brukerveiledning - kortversjon

## Endre knappers egenskaper

1. Trykk på panelets **Endre** knapp.
2. Trykk på den knapp du vil endre egenskapene for.
3. Endre knappens **Symbol**, **Etikett**, **Sidekopling** og andre egenskaper etter behov.

## Litt om passord

Passordbeskyttelse kan gis for funksjonene **Opptak**, **Endre**, og **Innstilling**. Om passordet endres ved uhell, kan du bruke hovedpassordet: **Dynamo**.

## Sikkerhetskopiering

Du bør ta sikkerhetskopiering av dine sider og innspillinger regelmessig ved å bruke den medfølgende programvaren, **Dynamo backup & utility**. Følg instruksjonene som finnes i **Hjelp** funksjonen som finnes i programvaren, eller les informasjonen i brukerveiledningen for ytterligere innformasjon.

## GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN  
Besøksadresse: Trollåsveien 8  
Telefon: 66 99 60 00  
Telefax: 66 80 94 90  
Teksttelefon: 66 80 93 90  
E-post: gewa@gewa.no  
Website: www.gewa.no