



# Activator

Det er på tide med en leselist som gir deg mange helt nye muligheter.....



- helping people



# Oppdag en ny dimensjon

Activator er ett nytt leselistkonsept: den utvider de velprøvde egenskapene til våre leselister - som de konkave punktkriftcellene og den patenterte ATC-teknologien for automatisk veksling - med fremtidsrettede innovasjoner fra enestående maskinvare- og programvareløsninger i et moderne design. Ved å kombinere potensialet til iPhone, tilbyr Activator neste generasjons punktskriftopplevelse.



[helptech.eu/braille-displays-activator](http://helptech.eu/braille-displays-activator)

Sammenleggbart  
2-i-1-tastatur

SmartDock  
med USB-port

Kortoversetter

iOS-App  
Helptech+





## To tastaturer - i ett

Et spesielt høydepunkt for Activator er det patenterte multifunksjonelle sammenleggbare tastaturet med punktskrift. Med ett blir det ergonomisk utformede punkttastaturet et fullverdig datatastatur med taktile egenskaper. Activator tilbyr den perfekte inndatamodusen for enhver applikasjon, enten punktskrift eller vanlig tastatur (QWERTY).  
Perfekt for skole, universitet eller jobb.

Det sammenleggbare tastaturet er laget av høykvalitets aluminium. Det er imponerende flatt med en høyde på kun 8 millimeter og setter en ny standard for design.

# Den smarte dockingstasjonen

SmartDock, som kan kobles magnetisk til Activator, skaper en banebrytende symbiose av punktskrift og iPhone, som gir helt nye muligheter. Med SmartDock blir Activator en mobil arbeidsstasjon på kort tid.

## Mange muligheter takket være USB

SmartDock har en USB-port på toppen. Med denne kan du åpne og redigere filer fra en USB-minnepinne via iPhone. Mange av de vanlige filformatene støttes allerede av iPhone. Og for alle andre filformater trenger du bare den aktuelle appen fra App Store. Du kan også koble andre enheter som hodetelefoner, mikrofoner eller SD-kortlesere til iPhone via USB.

## Delt lading

Hvis Activator er tilkoblet en strømadapter, lades også automatisk iPhone som er tilkoblet SmartDock. Du trenger bare å ta med deg én lader.



### Innebygget oversettelse for contracted Braille


Oversettelsen og tilbakeoversettelse av punktskrift grad 1 til kontraktert punktskrift (grad 2) er direkte integrert i aktivatoren. RTFC er verdens ledende oversettelsesverktøy for engelsk, tysk og fransk. Activator håndterer også enkelt oversettelse og tilbakeoversettelse til Unified English Braille (UEB). Innebygget oversettelse er kun for engelsk, tysk og fransk.

### Start iOS-apper direkte

Activator gjør det enklere enn noen gang å åpne favorittappene dine på iPhone. Du kan tilpasse Activatorens meny og legge til dine egne appfavoritter.

### Smarte tjenester

Forbindelsen med iPhone utvider de interne funksjonene til Activator by SmartServices. Den første funksjonen er en nyhetsfeedtjeneste, optimert for bruk med leselist, som du kan sette sammen etter dine personlige interesser.

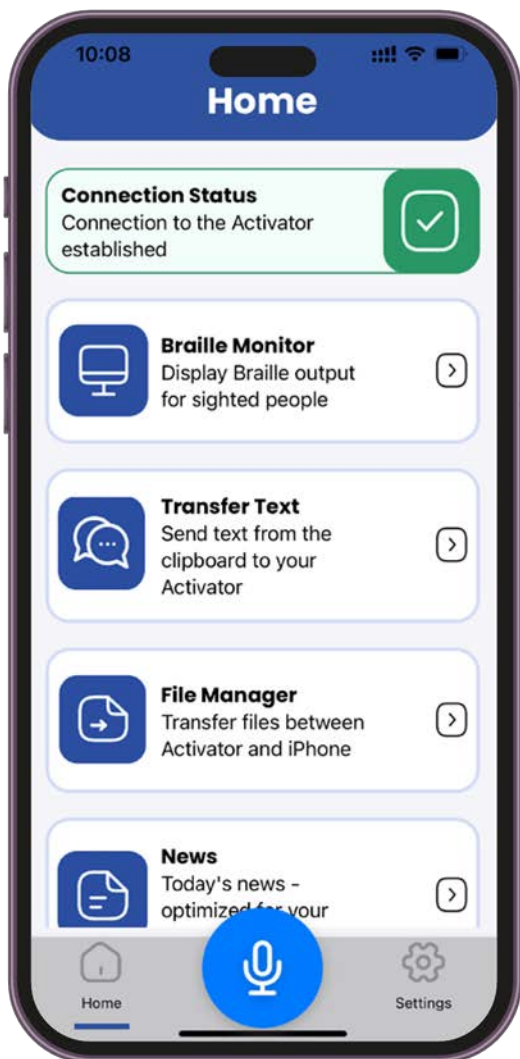

# Det perfekte tilbehøret: iOS-Appen HelpTech+

iOS-appen HelpTech+, er tilgjengelig for din iPhone, helt gratis. Appen HelpTech+ legger til mange nye funksjoner til Activator, noe som gjør den til en neste generasjons punktskriftopplevelse en gang for alle. Vi utvikler HelpTech+ kontinuerlig. Ytterligere nye funksjoner tilbys via App Store. Som et resultat vil vi fortsette å tilby deg en førsteklasses opplevelse i fremtiden.



## Braille monitor

Den integrerte leselisten lar en seende person følge informasjonen som vises på leselisten direkte på iPhoneskjermen. Inkludert indikasjon av leseposisjon, markert tekst og markørposisjon.



## Dikteringsfunksjon

Med dikteringsfunksjonen kan du enkelt diktere tekster i stedet for å skrive dem selv. Den gjenkjente teksten blir deretter enten lagret i en ny fil på Activator eller satt inn i en eksisterende fil på ønsket posisjon.



## Talefunksjon

Talefunksjonen lar deg få tekster på Activator lest opp gjennom iPhones høyttalere.



## Filbehandler

Med HelpTech+ kan du kopiere filer frem og tilbake mellom Activator og iPhone.



## Send tekst

Send tekst fra iPhone-utklippstavlen direkte til Activator.



# It is our pleasure to consult you

Together with our international partner we are there for you.



Help Tech GmbH  
Brunnenstr. 10  
72160 Horb - Germany



info@helptech.de  
www.helptech.eu



+49 (0)7451 5546-0

## TEKNISK DATA

- Vekt: 970g (Aktivator),  
100g (SmartDock)
- Mål i mm: Lukket: 32 x 2,6 x 12,6  
(BxHxD)
- Mål i mm: Åpen: 32 x 1,8 x 18,8  
(BxHxD)
- Batterilevetid: Over 30 timer
- Tilkoblinger Aktivator: USB-C,  
Bluetooth
- Tilkoblinger SmartDock: USB-A,  
Lightning

## Cantec AS

66 99 60 00  
post@cantec.no



Besøksadresse:  
Sofiemyrveien 4  
1412 SOFIEMYR

Postadresse:  
Postboks 626  
1411 SOFIEMYR

