

Bruksanvisning

# BAK-ØRET HØREAPPARATER CP/CPx

Juna, Carista, Acriva,  
Chronos, Inizia



**bernafon**<sup>®</sup>  
Your hearing · Our passion



# Innhold

<b>Modelloversikt</b>	<b>6</b>
<b>Oversikt ørepropper</b>	<b>7</b>
<b>Advarsler og sikkerhetsforskrifter</b>	<b>8</b>
Advarsler	8
Sikkerhetsforskrifter	12
<b>Beskrivelse av høreapparatet</b>	<b>14</b>
<b>Batteristørrelse</b>	<b>15</b>
<b>Bruksanvisning steg for steg</b>	<b>16</b>
Steg 1: Sett i batteriet	16
Steg 2: Slå høreapparatet på	17
Steg 3: Plassering av høreapparatet	18
Steg 4: Volumkontroll	22
Steg 5: Programbytte	23
Steg 6: Mute	24
Steg 8: Slå av høreapparatet	26
Steg 9: Skifte batteri	26
<b>Funksjoner i høreapparatet ditt</b>	<b>27</b>
<b>Rengjøring av høreapparatet</b>	<b>28</b>
<b>Vanlige problemer og løsninger</b>	<b>37</b>

Tilbehør	39
Produktlisens, merking og samsvarserklæring	40
Samsvarserklæring – krav for Europa	42
Internasjonal garanti	43
Informasjon og forklaring av symboler	48
Service	50

Gratulerer med dine nye Bernafon høreapparater. Audiografen din har finjustert høreapparatene etter ditt hørselstap. Med litt trening er du snart på vei til et liv med bedre hørsel.



Vennligst les hele denne bruksanvisningen før du tar i bruk dine høreapparat. Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner om bruk og vedlikehold.

### **Bruksområde**

Høreapparatet skal forsterke lyd for å kompensere for hørselstap.

Det kompenserer for milde til store hørselstap som er definert av American Speech-Language-Hearing Association (ASHA).

# Modelloversikt

Følgende høreapparater er beskrevet i bruksanvisningen:

## **Juna 9|7**

- JU9 CPx, med trådløs funksjonalitet
- JU9 CP, med trådløs funksjonalitet
- JU7 CPx, med trådløs funksjonalitet
- JU7 CP, med trådløs funksjonalitet

## **Acriva 9|7**

- AR9 CPx, med trådløs funksjonalitet
- AR9 CP, med trådløs funksjonalitet
- AR7 CPx, med trådløs funksjonalitet
- AR7 CP, med trådløs funksjonalitet

## **Chronos 9|7|5**

- CN9 CPx, med trådløs funksjonalitet
- CN9 CP, med trådløs funksjonalitet
- CN7 CPx, med trådløs funksjonalitet
- CN7 CP, med trådløs funksjonalitet
- CN5 CPx, med trådløs funksjonalitet
- CN5 CP, med trådløs funksjonalitet

## Carista 5|3






- CA5 CPx, med trådløs funksjonalitet
- CA5 CP, med trådløs funksjonalitet
- CA3 CPx, med trådløs funksjonalitet
- CA3 CP, med trådløs funksjonalitet

## Inizia 3|1

- IN3 CPx
- IN3 CP
- IN1 CPx
- IN1 CP

## Oversikt ørepropper

Ørepropper og domer er deler som sikrer at tynnslangen holder seg inne i øregangen og beskytter lydutgangen for voks.

Åpen dome	Tulip dome	Dome, stor vent	Dome, liten vent	Power dome
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				

# Advarsler og sikkerhetsforskrifter

Høreapparater og batterier kan være skadelige hvis de svelges eller ved annen uforsiktig bruk. Dette kan resultere i alvorlig skade og eventuelt varig hørselstap. Gjør deg godt kjent med følgende retningslinjer før du begynner å bruke høreapparatene dine.

## Advarsler

### Advarsler for høreapparatbrukeren

- ⚠ Ikke la andre benytte høreapparatene dine. Det kan føre til permanent hørselsskade for den som prøver dem.
- ⚠ Unngå å bruke høreapparatene når du utøver kontaktidretter (som f.eks. rugby, fotball, boksing, etc.). Et slag over øret mens høreapparatene sitter i kan medføre skade.



- ⚠ Høreapparat, tilbehør og batterier skal holdes utenfor rekkevidde for barn og ukyndige personer som ved et uhell kan komme til å svelge dem.
- ⚠ Oppbevar brukte og ubrukte batterier på et sted hvor barn, kjæledyr eller ukyndige personer ikke kan nå dem.
- ⚠ Rengjør høreapparatene og tilbehøret regelmessig som anbefalt av din audiograf eller forhandler. Hudirritasjon kan oppstå om produktene ikke rengjøres.
- ⚠ Vær forsiktig med batterier som lekker, da disse inneholder skadelig væske.
- ⚠ Prøv aldri å lade ikke-oppladbare batterier.

Skift aldri batterier eller juster høreapparatene foran barn eller ukyndige personer.

Vær klar over at høreapparatene kan slutte å fungere uten forvarsel. Du må ta hensyn til dette når du er ute i trafikken eller er avhengig av viktige varslingslyder.

Trafikk eller andre varslingslyder kan bli redusert ved bruk av en retningsmikrofon når lydene kommer bakfra.

Ta av høreapparatene før du tar på aftershave, hårspray, parfyme, kremer osv. Dersom høreapparatene utsettes for denne type produkt, la produktet tørke før du tar høreapparatene på igjen.

## **Advarsel til audiograf og høreapparatbrukere**

- ⚠ Spesielle hensyn må tas ved tilpasning av høreapparater som har et maksimum lydtryknivå som overskrider 132 dB SPL (IEC 60318-4), da det kan være fare for å skade den resterende hørselen til høreapparatbrukeren.
- ⚠ Når DAI er koblet til en elektrisk enhet, må utstyret oppfylle sikkerhetskravene til EN 60601-1-1, EN 60065 eller tilsvarende. Sikkerheten til høreapparater med DAI er bestemt av den eksterne lydkilden.

## Sikkerhetsforskrifter


- Høreapparatene brukes kun som anvist.
- Høreapparatene bør tilpasses av en autorisert audiograf.
- Misbruk kan føre til plutselig og permanent hørselsskade.
- Høreapparatene kan ikke gjenskape normal hørsel eller forhindre hørselstap.
- Putt aldri batterier eller høreapparatet i munnen.
- Oppbevar aldri batterier sammen med medisiner. Batterier kan lett forveksles med tabletter.
- I tilfelle du skulle svelge et batteri eller høreapparat må du oppsøke lege umiddelbart.
- Vær oppmerksom på at bruk av høreapparater kan føre til at ørevoks samler seg og tetter øregangen.
- Ørevoks må ofte fjernes av helsepersonell.
- Oppsøk lege dersom høreapparatene fremkaller allergiske reaksjoner.

- Ta kontakt med audiografen din dersom du opplever ubehag eller irritasjon i ørene ved bruk av høreapparatene.
- Ikke dytt rengjøringsutstyr inn i høyttaleren eller mikrofonen. Dette kan skade høreapparatet.
- Ikke utsett høreapparatene for sterk varme ved å legge dem i bilen, nær en radiator, osv.
- Unngå å bruke høreapparatene ved bading, snorkling eller dykking, da de ikke er laget for slike aktiviteter.
- Ikke dypp høreapparatene i vann eller andre væsker.
- Ta av høreapparatene når du sover.
- Beskytt høreapparatene ved å oppbevare dem i etuiet når du ikke bruker dem.

# Beskrivelse av høreapparatet

## CPx og CP

Med hook

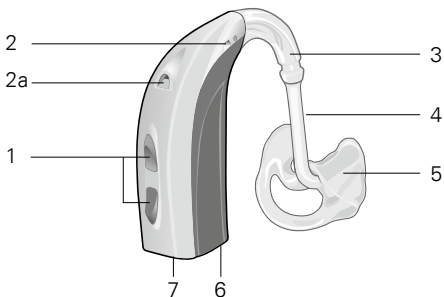


- 1 Multikontroll
- 2 Mikrofon
- 2a Bakre mikrofon
- 3 Hook

- 4 Slange
- 5 Ørepropp
- 6 Batteriluke
- 7 Audioinngang  
(ved bruk av DAI-adapter)

## CPx og CP

Med Spira Flex tynnslange

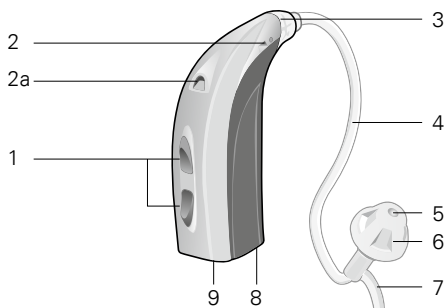

- |    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1  | Multikontroll         | 5 | Lydutgang                                 |
| 2  | Mikrofon              | 6 | Dome                                      |
| 2a | Bakre mikrofon        | 7 | Sportslås                                 |
| 3  | Adapter               | 8 | Batteriskuff                              |
| 4  | Spira Flex tynnslange | 9 | Audioinngang<br>(ved bruk av DAI-adapter) |


## Batteristørrelse

Høreapparatet benytter 13-batteri.

# Bruksanvisning steg for steg

## Steg 1: Sett i batteriet


- Åpne batteriskuffen forsiktig helt opp (A).
- Fjern klistrelappen fra batteriet (B).
- Legg batteriet i batteriskuffen med + tegnet opp (C).

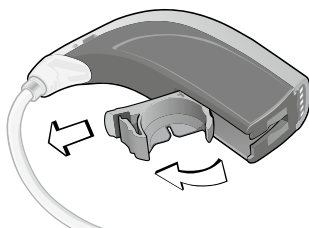

A



B

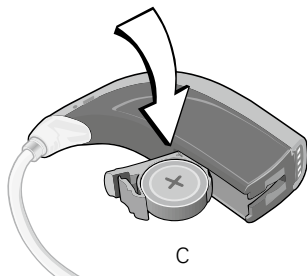


C



## Steg 2: Slå høreapparatet på

Lukk batteriskuffen helt. Du vil merke et lite knepp. Høreapparatet er nå slått på.

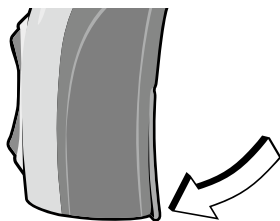


"På"

**i** Tving aldri batteriskuffen opp eller igjen.

### **Steg 3: Plassering av høreapparatet**

Høreapparatene er programmert ulikt for høyre og venstre øre.

Høreapparatet skal være utstyrt med et lite merke inne i batteriskuffen som viser hvilket øre det tilhører.

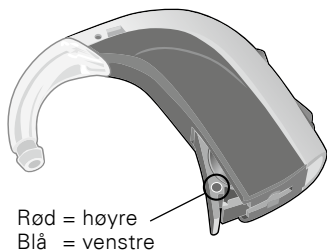

### **Steg 3a: Plassering av høreapparatet med ørepropp**

- Bruk høyre hånd for å sette høyre ørepropp på plass og venstre hånd for å sette venstre ørepropp på plass.
- Hold proppen slik at kanaldelen peker mot inngangen til øregangen.
- Skyv øreproppens kanaldel inn i øregangen og vri forsiktig for å få proppen riktig plassert.



- Kjenn med fingeren din over øret. Hvis du kan kjenne den øverste delen av øreproppen, er den ikke plassert riktig. Trykk den forsiktig på plass.
- Legg høreapparatet på plass bak øret. Vær forsiktig slik at slangen ikke blir vridd.




**i** Det å sette øreproppen riktig inn krever øvelse og tålmodighet. Dersom du har problemer med å plassere øreproppen riktig, vennligst kontakt din audiograf.

### Steg 3b: Plassering av høreapparatet med Spira Flex tynnslange

- Legg først høreapparatet bak øret (A).
- Ta tak i lydslangen og dytt forsiktig domen inn i øregangen slik at lydslangen ligger helt inntil hodet (B).
- Legg sportslåsen i ørebuen bak øreflippen (C).
- Dersom lydslangen stikker ut av øret, dyttes domen lengre inn i øregangen.
- Hvis sportslåsen stikker ut, har den ikke blitt lagt ordentlig på plass. Prøv igjen.



A

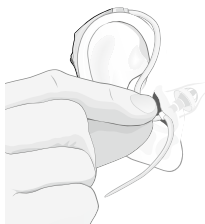

B




C

**i** Dersom domen ikke er satt ordentlig på plass på tynnslangen kan den løsne inne i øregangen. Kontakt helsepersonell dersom dette skjer.

## Steg 4: Volumkontroll

For å øke volumet, gi den øverste Multikontroll-knappen et kort trykk (mindre enn 1 sekund) og gjenta til styrken er passe.


For å redusere volumet, gi den nederste Multikontroll-knappen et kort trykk (mindre enn ett sekund) og gjenta til du synes styrken er passe.

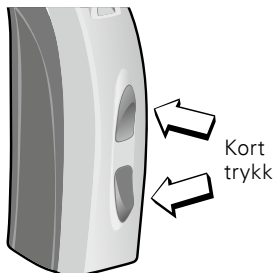

Du vil høre et klikk som bekrefter at styrken er endret og en pipetone når du er på minimum eller maksimum styrke. Høreapparatet ditt kan være programmert til å spille av en pipetone når forhåndsprogrammert volumnivå nås. Be din audiograf om nærmere informasjon.

## Steg 5: Programbytte

Programbytte skjer ved et middels langt trykk (ca. 1 sekund) på enten øverste eller nederste Multi-kontroll-knapp. Antall pipetoner du hører forteller deg hvilket program som er aktivert.

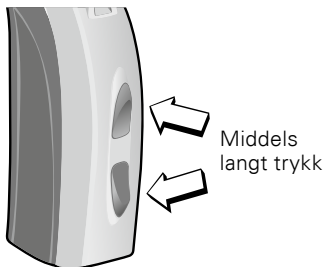


Høreapparatet ditt kan inneholde opp til 4 lytteprogrammer. Be audiografen din informere om de ulike lytteprogrammene i høreapparatene dine.

- i** Høreapparatet ditt går automatisk tilbake til standard volumnivå når det blir slått på, når batteriet nesten er utladet eller ved programbytte. Dersom du stadig må justere volumet opp eller ned, kan din audiograf justere innstillingene i apparatet.

## Steg 6: Mute

Din audiograf kan programmere en mute-funksjon i høreapparatene.

Høreapparatene dine kan mutes ved å gi den øverste eller nederste Multikontroll-knappen et langt trykk (omtrent 2 sekunder).

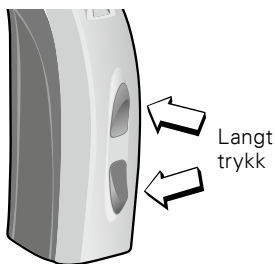

Trykk på hvilken som helst knapp på høreapparatet for å slå på lyden igjen.

**i** Ikke bruk mute-funksjonen til slå av høreapparatene. Dette er en funksjon hvor apparatene fortsatt trekker strøm fra batteriene.



## **Steg 7: Fjerning av høreapparatet**

### **Steg 7a: Fjerning av høreapparat med ørepropp**

- Løft først apparatet av øret.
- Dytt bakre del av øret inn mot hodet med tommelfingeren, og grip tak i øverste del av øreproppen med pekefingeren.
- Vri øreproppen forsiktig fremover.
- Dra øreproppen forsiktig rett ut.


### **Steg 7b: Fjerning av høreapparat med Spira Flex tynnslange**

- Ta tak i lydslangen og dra forsiktig slangen og dommen ut av øret.
- Fjern høreapparatet fra øret.

**i** Ikke fjern øreproppen eller lydslangen og dommen ved å dra i høreapparatet. Det kan føre til at slangen eller øreproppen løsner fra høreapparatet.

## Steg 8: Slå av høreapparatet

Åpne batteriskuffen til du kjenner et knepp. Høreapparatet er nå slått av.

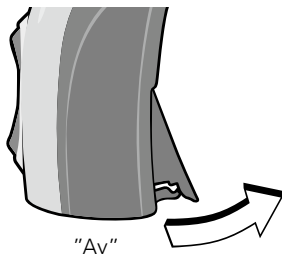

## Steg 9: Skifte batteri

Når batteriet begynner å gå tomt, vil du med jevne mellomrom høre pipetoner i høreapparatet. Batteriet bør da byttes med en gang. Hvor lang tid det tar til batteriet er helt utladet avhenger av batteritype og produsent. I kvikksølvfrie batterier får man ofte varslingsstone på et tidlig stadium.

## Funksjoner i høreapparatet ditt

Følgende funksjoner kan være aktivert i høreapparatet ditt. Be audiografen din om informasjon angående hvilke funksjoner som er aktivert.

- Telespole** hjelper deg til å høre bedre når du snakker i telefonen eller når du befinner deg i lokaler med installert teleslynge.



Dette eller lignende symbol viser at det er installert teleslynge.

- AutoTelefon** kan aktiveres automatisk slik at du ikke behøver å bruke Multikontroll-knappen for å aktivere telefonprogrammet.
- Direct Audio Input (DAI)-adapter** sørger for at høreapparatet kan motta signaler direkte fra en ekstern lydkilde som f.eks. TV, mp3-spiller osv.
- FM-adapter** sørger for at høreapparatet kan motta signaler direkte fra en ekstern trådløs FM-sender.

## Rengjøring av høreapparatet

Normale ører produserer ørevoks som kan tette høreapparatet. Vennligst følg rengjøringsinstruksjonene for å forhindre at dette skjer.

For nærmere informasjon, kontakt din audiograf eller se instruksjonsvideoer under fanen "Our Products" på [www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)

## Generelt vedlikehold

Behandle høreapparatet ditt som annet sensitivt elektronisk utstyr (se Sikkerhetsforskrifter på side 8), og pass på at høreapparatet ikke blir utsatt for fuktighet.

- Rengjør og tørk hendene dine før du betjener høreapparatet ditt.
- Bruk ikke høreapparatet uten dome eller propp.
- Plasser aldri en brukt dome på Spira Flex tynnslangen.

Følg disse retningslinjene om ditt høreapparat har kommet i kontakt med vann:

- Tørk forsiktig av vann som er på utsiden av apparatet.
- Åpne batteriskuffen å ta ut batteriet.
- Tørk forsiktig av vannet i batteriskuffen.
- La høreapparatet tørke med batteriskuffen åpen i om lag 30 minutter.
- Sett inn et nytt batteri (se side 30) og lukk batteriskuffen. Høreapparatet ditt skal fungere normalt igjen.

## **Daglig rengjøring**

- Kontroller høreapparatene for ørevoks og tørk av dem med tørkepapir eller en klut.
- Dersom nødvendig, benytt medfølgende rensepinne for å fjerne voks fra kanalen eller i ventileringen på dommen eller øreproppen.
- Åpne batteriskuffen for lufting.
- Et tørkesett er anbefalt for å fjerne eventuell fukt i høreapparatet. Fjern alltid batteriet før du tørker høreapparatet med tørkesettet, for å unngå forkortelse av batteriets levetid.

## **Spesifikk rengjøring**

### **A: Rengjøring av øreproppen**


Du må vaske øreproppene jevnlig. Selve høreapparatet må aldri vaskes eller bli vått.

- Ved rengjøring av høreapparatene bør du holde dem over et mykt underlag slik at du unngår skader på apparatene dersom du mister dem.
- Koble øreproppen fra høreapparatet ved å holde i hooken med den ene hånden og slangen med den andre (A).

- Dra hooken og slangen forsiktig fra hverandre.
- Rengjør **øreproppen** forsiktig i varmt såpevann.
- Skyll øreproppen og la den tørke helt.
- Bruk en blåseball for å fjerne eventuell fuktighet i lydgangen (B).
- Når du fester lydslangen til høreapparatet, er det viktig at den blir satt på riktig.



A

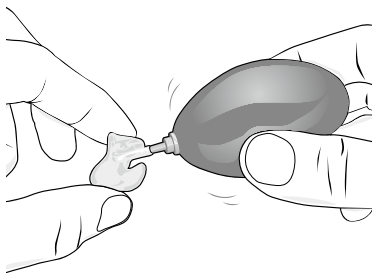


B

## B: Rengjøring av Spira Flex tynnslange


Dersom du har Spira Flex tynnslange, må du passe på at slangen og øredomen til enhver tid er fri for ørevoks.

- Ta tak i adapteret og koble tynnslangen fra høreapparatet ved å dra i tynnslangen (A).
- Bruk en myk klut til å rengjøre slangen og øredomen.
- For å fjerne voks inne i tynnslangen, stikk rensespinnen inn i slangen fra den enden som er festet på høreapparatet. Dytt rensespinnen hele veien gjennom til den kommer ut gjennom domen (B).
- Dra rensespinnen ut gjennom domen og kast den (B).
- Koble deretter tynnslangen til adapteret på høreapparatet (A).

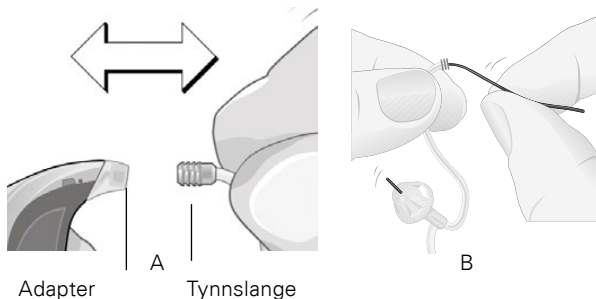



- Hvis du har en dome med ventilering benytter du rensespinnen for å fjerne ørevoks fra ventileringen (C).

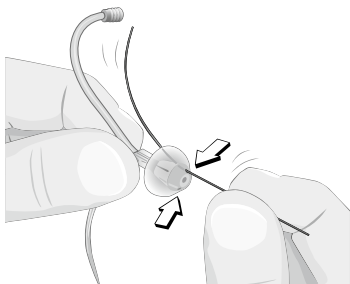


C

**i** For å unngå at lydslangen blir blokkert, bruk aldri vann ved rengjøring.


## **C: Hvordan bytte dome**

Undersøk domen for å se om den er misfarget eller hard. Hvis dette er tilfelle anbefaler vi å bytte dome. Du kan bestille nye domer hos din leverandør eller hos audiografen din.

- Vask hendene før du bytter dome. Bytt aldri dome med våte eller skitne fingre.
- Fjern den gamle øredomen ved å dra den av tynnslangen (A).
- Trykk en ny øredome så langt inn på lydslangen som mulig. Når øredomen er i kontakt med plastringen rundt lydslangen, er den satt riktig på plass (B).

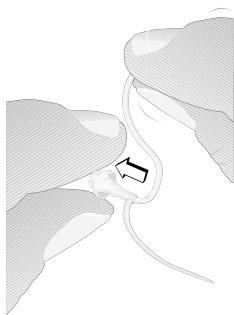

A

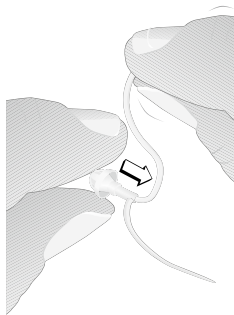

B


**i** Dersom øredomen ikke er satt riktig på plass, kan den løsne og bli liggende inne i øregangen. Ta kontakt med lege hvis dette skjer.

**i** Sett aldri på en brukt dome eller tynnslange. En brukt dome har lettere for å løsne og bli liggende i øregangen.

## D: Hvordan bytte Spira Flex lydslange

Lydslangen bør byttes dersom den blir misfarget, stiv eller sprø.

- Ta tak i høreapparatet og tynnslangen like ved adapteret.
- Dra for å fjerne den gamle slangen.
- Sett på en ny slange ved å dytte den inn i adapteret.

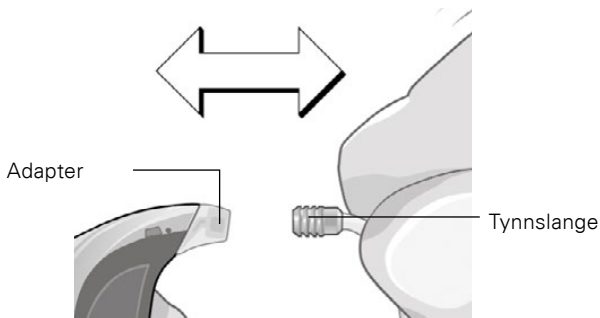

# Vanlige problemer og løsninger

## **Høreapparatet piper**

Sjekk at øreproppen er satt riktig på plass. Dersom den er det, og høreapparatet fremdeles piper, kontakt din audiograf.

## **Ingen lyd, svak lyd eller summelyd**

Kontroller om nivået på lyden er for svakt og juster opp med volumkontrollen på høreapparatet. Dersom det er helt stumt, sjekk om «mute» er aktivert. Er det fremdeles ingen lyd, sjekk om batteriluka er helt lukket og om batteriet er satt i riktig. Bytt eventuelt batteri. Dersom dette ikke hjelper, kontakt din audiograf.

## **Hvislende lyd, svak lyd eller durelyd**

Åpne og lukk batteriluka flere ganger eller rengjør batterikontaktene forsiktig med en tørr bomullspad, eventuelt bytt batteri. Dersom dette ikke hjelper, kontakt din audiograf.

## **Høreapparatet slås periodevis av og på**

Lavt batterinivå. Bytt batteri.

## **Høreapparatet piper uten at du betjener det**

Lavt batterinivå. Bytt batteri.

## **Andre problemer med høreapparatet**

Dersom det oppstår andre problemer med høreapparatet, ta kontakt med din audiograf.

# Tilbehør

Bernafon tilbyr et bredt utvalg av tilbehør som kan forbedre funksjonaliteten i høreapparatene dine ytterligere. Avhengig av type høreapparat og lokale forskrifter, er følgende tilbehør tilgjengelig:

- Fjernkontroll
- SoundGate kommunikasjonsutstyr (for trådløs overføring fra mobiltelefon, mp3-spiller etc.)
- SoundGate Mikrofon (for tilkobling av trådløs mikrofon)
- TV-adapter (for trådløs overføring av lyd fra TV via SoundGate)
- Telefonadapter (for trådløs overføring av lyd fra hustelefon via SoundGate)
- DAI og FM-adapter
- Batteriluke med barnesikring (anbefales ved tilpasning på barn)
- Rense- og tørkesett

**For nærmere informasjon om tilbehør, vennligst ta kontakt med din audiograf.**

# Produktlisens, merking og samsvarserklæring

Alle Bernafon høreapparater samsvarer med internasjonale standarder når det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet. På grunn av størrelsen på høreapparatene finnes all relevant merking i dette dokumentet.

## **Elektromagnetisk interferens**

Høreapparatene dine er grundig testet for elektromagnetisk interferens. Likevel kan andre produkter sende ut elektromagnetisk energi som kan forårsake uforutsett interferens med høreapparatene.

Eksempler er induksjonsplatetopper, butikkalarmer, mobiltelefoner, faksmaskiner, PC-er, røntgen, CT etc. Til tross for at høreapparatene dine er laget for å



oppfylle internasjonale standarder når det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet, kan de utstråle elektromagnetisk energi som kan skape interferens med annet utstyr.

Høreapparatene dine inneholder en radiosender som benytter kortbølget magnetisk induksjonsteknologi på 3,84 MHz. Den magnetiske energien i senderen er  $< -42 \text{ dB}\mu\text{A/m @ 10 m}$ .

Den elektromagnetiske strålingen fra radiosystemet ligger langt under internasjonale grenser for menneskelig eksponering. Til sammenligning er den elektromagnetiske strålingen fra høreapparatene lavere enn fra husholdningsapparater som halogenlamper, oppvaskmaskiner etc.

## Samsvarserklæring – krav for Europa

Dette utstyret er i samsvar med kravene i hht. EU-Direktiv 93/42/EEC for medisinskteknisk utstyr, MDD. Dette er sertifisert med følgende merking:



Alt utstyr med trådløs funksjonalitet (Juna, Acriva, Chronos og Carista) er også i samsvar med de grunnleggende kravene i Europarådets Direktiv 1999/5/EC vedrørende radioutstyr og telekommunikasjonsutstyr, R&TTE. Det fungerer som en induktiv enhet i et harmonisert frekvensbånd i hht. kommisjonsavgjørelse 2008/432/EC og kan benyttes av alle medlemmer av EU og EFTA. Dette er sertifisert med følgende merking:



Samsvarserklæringer er tilgjengelig hos:

Bernafon AG  
Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Switzerland

## Internasjonal garanti

Høreapparatet er dekket av en begrenset garanti som dekker material- og produksjonsfeil.

Denne garantien dekker selve høreapparatet, men ikke tilbehør slik som batteri, slange, ørepropp osv.

Garantien er ugyldig dersom feilen er et resultat av feilaktig bruk. Garantien gjelder heller ikke dersom høreapparatet er reparert av ikke-autorisert personell.

Gå igjennom garantibeviset sammen med din audiograf for å forsikre deg om at det er korrekt utfyllt.

**i** Endringer eller modifiseringer som ikke er godkjent av Bernafon AG kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dato: \_\_\_\_\_ Modell: \_\_\_\_\_

Garantiperiode: \_\_\_\_\_

Modell V: \_\_\_\_\_ Modell H: \_\_\_\_\_

Serienummer.: \_\_\_\_\_ Serienummer.: \_\_\_\_\_

Batteristørrelse: \_\_\_\_\_ Batteristørrelse: \_\_\_\_\_

Høresentral/klinikk:

# Notater

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....


# Notater

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

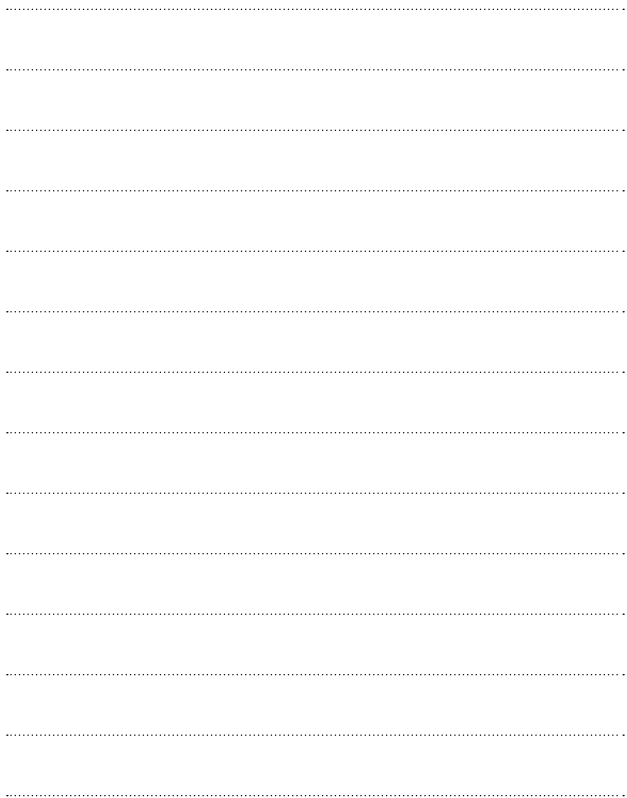

# Informasjon og forklaring av symboler

---

 CE-merkingen viser at høreapparatene oppfyller kravene i henhold til alle relevante EU-direktiver.

---



Dette symbolet angir at produkter som er beskrevet i denne bruksanvisningen er i overensstemmelse med krav til en anvendt del av Type B i EN 60601-1. Overflaten av høreapparatet er spesifisert som anvendt del av Type B.\*

---



Dette symbolet betyr at det er viktig for brukeren å lese og ta hensyn til relevant informasjon i denne bruksanvisningen.

---

**IP57** Dette symbolet indikerer graden av beskyttelse mot vann og støvpartikler i henhold til EN 60529:1991/A1:2000. IP5X indikerer graden av støvtetthet. IPX7 indikerer graden av vanntetthet.

---

\*gjelder kun Juna, Acriva, Chronos og Carista





Dette symbolet angir viktig sikkerhetsinformasjon det må tas hensyn til for å minimere risiko eller unngå farlige situasjoner.



Viktig informasjon om bruk og produkt-sikkerhet.



En avfallsdunk med kryss over  
Betyr at det Europeiske direktiv 2002/96/EC om avfallshåndtering av elektronisk utstyr gjelder.

---

### **DRIFTSFORHOLD**

Produktet er utformet slik at det fungerer uten problemer eller begrensninger dersom det blir brukt som forutsatt, med mindre annet er oppgitt i denne bruksanvisningen.

---

### **TRANSPORT OG LAGRINGSFORHOLD**

Under transport eller lagring, bør ikke temperaturen overstige grenseverdien på – 25 °/60 ° Celsius.

---

## Service

Dersom ingen av de foreslåtte løsningene hjelper, ta kontakt med din audiograf.

**Ikke forsøk å reparere høreapparatet selv.**

Sett stempel med hørselssentralens navn og adresse her:

< >  
8,15 mm

Placeholder  
for FSC logo



FSC  
MIX  
Paper

^  
19 mm  
v

^  
9,0 mm  
v

< 15 mm >

## Produsent

Bernafon AG  
Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Sveits  
Telefon +41 31 998 15 15  
info@bernafon.ch  
www.bernafon.com

## Norge

Gewa AS  
Postboks 626, 1411 KOLBOTN  
Besøksadresse: Trollåsveien 8  
Telefon 66 99 60 00  
Telefaks 66 80 94 90  
www.gewa.no



0543 0682



IP57



0000143476000001

**bernafon**   
Your hearing • Our passion