

Bruksanvisning

FJERNKONTROLL RC-N

bernafon[®]

Your hearing • Our passion

Gratulerer med din nye RC-N fjernkontroll. Med fjernkontrollen kan du gjøre justeringer på høreapparatene som programbytte og volumjusteringer.



Vennligst gjør deg kjent med bruksanvisningen før du begynner å bruke fjernkontrollen. Den inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og informasjon om bruk og vedlikehold.

Innhold


Sikkerhetsforskrifter	6
Innhold	14
RC-N oversikt	15
Innsetting og fjerning av batteri	16
Betjening av høreapparatene	20
Statuslys	21
Justering av volum	22
Mute-funksjon	23
Bytte program	25
Tastelås	26
Bruk av snor	29

Bruk og vedlikehold	30
Informasjon til brukeren om radiokommunikasjon – gjelder USA og Canada	31
Internasjonal garanti	36

Sikkerhetsforskrifter

Gjør deg godt kjent med sikkerhetsforskriftene før du tar i bruk fjernkontrollen.

Advarsler

 Fjernkontrollen er ikke et leketøy og må holdes unna barn eller andre som kan svelge deler eller på annen måte skade seg selv. Vær spesielt forsiktig når det gjelder mindre deler slik at man unngår svelging eller kvelning. Hvis en del svelges, må lege oppsøkes umiddelbart.

- ⚠ Utsett aldri fjernkontrollen for ekstrem varme som å legge den i mikrobølgeovnen, brenne den eller la den ligge i sola i bilen. Da kan den eksplodere og forårsake alvorlige skader.
- ⚠ Fjernkontrollen skal ikke brukes på flyreiser hvis du ikke har fått spesiell tillatelse fra flypersonalet.

- ⚠ Det er anbefalt å følge produsenter av defibrillatorer og pacemakere sine retningslinjer når det gjelder bruk av mobiltelefon. Hvis du har implantat skal fjernkontrollen ikke være nærmere enn 15 cm fra implantatet.
- ⚠ Strømkilden til fjernkontrollen yter for lite energi til å forårsake brann under normale omstendigheter. RC-N har ikke blitt testet etter internasjonale standarder når det gjelder bruk i eksplosive omgivelser. Det er ikke anbefalt å bruke fjernkontrollen i områder hvor det er fare for eksplosjoner.



Det anbefales å rengjøre fjernkontrollen med jevne mellomrom. Bruk en tørr eller lett fuktig klut uten løsemidler. Fjernkontrollen må ikke utsettes for, eller bli rengjort med, kjemikalier eller alkohol. Kjemikalier i kosmetikk, hårspray, parfyme, aftershave, oljer og solkremer kan skade fjernkontrollen. Legg fjernkontrollen til side ved påføring av slike produkter og la de tørke før du igjen tar i bruk fjernkontrollen. Du må ikke under noen omstendigheter legge fjernkontrollen i vann eller andre væsker.

- ⚠ Ved bruk av håndlenke (snor) må man forsikre seg om at den er designet riktig og passer til formålet. Bruk aldri halssnor da dette kan føre til kvelning.
- ⚠ Ikke bruk fjernkontrollen i forbindelse med røntgen, CT / MR / scanning, elektrosjokk eller operasjoner.
- ⚠ Bruk av fjernkontrollen ved kjøring av bil kan distrahere deg. Hvis kjøreforhold eller trafikkregler krever det, kjør til side og parker bilen før du tar den i bruk.

- ⚠ Benytt alltid batterier anbefalt av din audiograf. Batterier av dårlig kvalitet kan lekke og forårsake skade på huden. Et utladet batteri skal erstattes med en gang.
- ⚠ Aldri prøv å lade ikke-oppladbare batterier. De kan eksplodere. Ikke brenn utladede batterier. Det er en viss risiko for at de kan eksplodere og forårsake skade.
- ⚠ Hjelp oss å beskytte miljøet ved ikke å kaste batteriene i husholdningsavfallet. Resirkuler batteriene eller returner de til utsalgsstedet.



Fjernkontrollen benytter digitalt induktive signaler for å overføre kommandoer til høreapparatene. Selv om det er lite sannsynlig, råder det en viss bekymring for at disse signalene kan påvirke medisinsk utstyr som f.eks. pacemakere. For sikkerhets skyld anbefaler vi derfor at pasienter som bruker pacemaker ikke har fjernkontrollen i brystlommen eller rundt halsen.

⚠ Emisjonsstyrken fra fjernkontrollen er under den internasjonale utslippsgrensen for menneskelig eksponering. Til sammenligning er stråling fra fjernkontrollen RC-N mindre enn den elektromagnetiske strålingen fra hårføner, elektriske barbermaskiner, etc. Fjernkontrollen RC-N oppfyller de internasjonale standardene for elektromagnetisk kompatibilitet.

Innhold

Følgende deler er inkludert i pakken og vil bli omtalt i denne bruksanvisningen:



RC-N fjernkontroll
Modell: RC-2B

AAAA batterier




Bruksanvisning



RC-N oversikt

- 1 Volum opp
- 2 Volum ned
- 3 Programknapp
- 4 Statuslys
- 5 Batteriluke
- 6 Finger-grep
- 7 Feste til snor




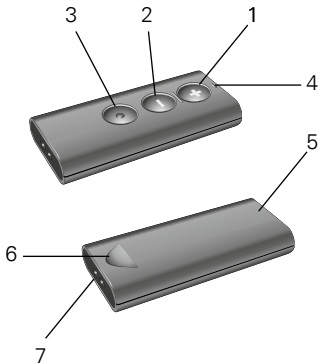


Innsetting og fjerning av batteri

Fjernkontrollen RC-N benytter 2 Alkaline AAAA batterier. Følg instruksjonene under for batteribytte.



Ta av batteridekselet

1. Bruk tommelfingeren og trykk ned som vist på bildet
2. Skyv batteridekselet i retningen som indikert
3. Løft hele dekselet
4. Sett batteriene i batteriskuffen og forsikre deg om at de ligger riktig vei

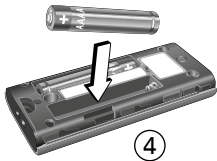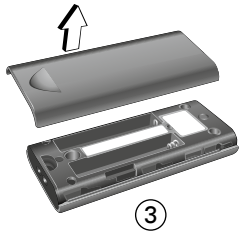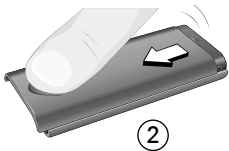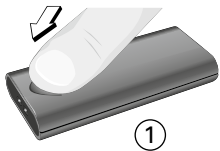

Påsetting av batteridekselet

1. Plasser batteridekselet omtrent 6 mm fra toppen av fjernkontrollen
2. Skyv dekselet som vist til du merker et klikk

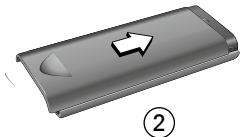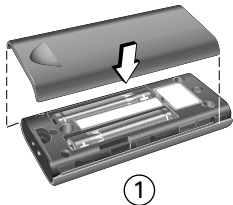

i Ikke tving batteridekselet på plass. Hvis du føler at du må bruke makt er det ikke satt i riktig posisjon. Start om igjen. Batterilevetiden avhenger av hvordan og hvor mye du bruker fjernkontrollen.


Betjening av høreapparatene

Med fjernkontrollen kan du betjene høreapparatene innenfor en rekkevidde på 1 meter.

Anbefalt bruk




Håndholdt

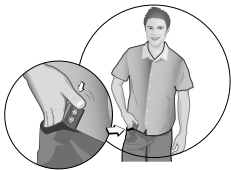


I lommen

Statuslys

RC-N operativ	Statuslyset indikerer at fjernkontrollen er operativ. Det vil blinke en gang etter hvert trykk.	
Lavt batterinivå	Når batteriet bør byttes vil statuslyset blinke sakte (hver 2. sekund).	
RC-N tastelås på	Når tastelåsen er slått på vil statuslyset blinke 3 ganger.	


Justering av volum

Med RC-N fjernkontroll kan du justere volumet i høreapparatene opp og ned.

Øke volumet	Trykk på volum opp-knappen	
Redusere volumet	Trykk på volum ned-knappen	

Mute-funksjon


Med RC-N kan du slå av lyden (mute) på høreapparatet ditt ved å bruke volum ned-knappen.

<p>Slå av lyden på høreapparatet ditt</p>	<p>Trykk og hold volum ned-knappen inne i 2 – 3 sekunder. Statuslyset vil slukke når lyden på høreapparatet er slått av.</p>	
<p>Slå på lyden på høreapparatet ditt</p>	<p>Trykk på hvilken som helst knapp for å slå på lyden igjen.</p>	

i Du slår ikke av høreapparatet ved å bruke mute-funksjonen. For å slå av høreapparatet, se i bruksanvisningen som fulgte med høreapparatet.

Bytte program

Med RC-N fjernkontroll kan du navigere mellom de ulike lytteprogrammene med programknappen.

<p>Velge / bytte program</p>	<p>Trykk på programknappen for å bytte program i høreapparatene. Hvert trykk tar deg til neste program i programrekken.</p>	 An illustration of a grey remote control with three circular buttons: a top button with a plus sign, a middle button with a minus sign, and a bottom button. A hand is shown pressing the bottom button, with motion lines indicating the action.
------------------------------	---	---

Tastelås

For å hindre ufrivillige justeringer mens fjernkontrollen ligger i lommen, kan du aktivere tastelåsen.

Aktivere tastelås

1. Trykk og hold inne volum ned- og programknappen i 3–4 sekunder



2. Statuslyset vil blinke to ganger når knappene er låst.

For å forsikre deg om at tastelåsen er på, trykker du på hvilken som helst knapp. Statuslyset vil blinke tre ganger for å bekrefte at tastelåsen er slått på (se side 21).

Deaktivere tastelås

1. Trykk og hold inne volum ned- og programknappen i 3–4 sekunder
2. Statuslyset vil lyse stabilt til tastelåsen er deaktivert.

Bruk av snor

RC-N fjernkontroll er utstyrt med et feste der du kan montere en snor slik at den blir lettere å frakte med seg.

1. Fjern batteridekselet (se side 16 og 17)
2. Tre en tynn snor gjennom hullene



Bruk og vedlikehold

- Hold RC-N fjernkontroll over et mykt underlag når du bytter batterier eller rengjør den i tilfelle du skulle være uheldig å miste den
- Rengjør fjernkontrollen regelmessig med en tørr eller lett fuktet klut
- Unngå at fjernkontrollen blir våt

Informasjon til brukeren om radiokommunikasjon – gjelder USA og Canada

USA and Canada

Due to the limited size available on the device, many of the relevant approval markings are found in this document.

This instrument is certified under:

FCC ID: 2ACAHREMCTR01

IC: 11936A-REMCTR01

The device complies with Part 15 of the FCC rules and RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference; and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SBO Hearing A/S hereby declares that this remote control is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Samsvarserklæring er tilgængelig hos:

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.sbohearing.com

Internasjonal garanti

RC-N fjernkontroll har en garanti som dekker feil i materialer og utførelse. Denne garantien gjelder ikke dersom defektene er et resultat av feilaktig eller uforsiktig bruk.

Denne garantien gjelder heller ikke dersom uautorisert personell har reparert RC-N. Gå igjennom garantikortet med din audiograf og forsikre deg om at det er riktig utfyllt.

Dato: _____ Modell: _____

Garantiperiode: _____

Serienummer: _____

Høresentral/klinikk

Notater

Notater

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hovedkontor

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.sbohearing.com



0682



N1175



0000143922000001

bernafon 

Your hearing • Our passion