

Hva er nytt

Brailliant BI 20X, Brailliant BI 40X og Mantis QT40 hva er nytt.

Introduksjon til en NY terminalmodus

- En ny modus er tilgjengelig som fjerner alle interne applikasjoner for å gjøre leselisten til en ren leselist uten interne applikasjoner tilgjengelig.
- Begrenset til 1 USB- og 1 Bluetooth-tilkobling
- USB-plugg og bruk
- For å pare Bluetooth, fjern USB-tilkobling og søkeenheter fra vertsdatabasene
- Hvis du vil bytte mellom USB- og Bluetooth-tilkoblinger, kobler du til/trekker ut USB-kabelen
- USB vil alltid ha prioritet med Plugg og bruk
- For å gå inn og ut av innstillingene for leselisten, trykk og hold inne Hjem-knappen i 3 sekunder.
- For å aktivere eller deaktivere bare Terminal mode, start display i diagnosemenyen
 - Et alternativ i diagnosemenyen kalt bare Terminal mode er tilgjengelig
 - Trykk Enter for å veksle mellom på og av.

Automatisk avslåing

- En ny innstilling i brukerinnstillinger kalt Automatisk avslåing av er tilgjengelig som ytterligere forbedrer
 - Tilgjengelige alternativer inkluderer 1time, 2timer, 3timer, 4timer eller aldri
 - Når den er aktivert, hvis ingen interaksjon har funnet sted, begynner enheten å slå seg av
 - En melding vil indikere at enheten slår seg av, slik at du kan avbryte avslutningen.
- La til en automatisk lagring i en midlertidig fil hvis enheten slås av med et dokument som ikke er lagret åpnet

Andre rettelser og forbedringer

- Oppdatert Liblouis punktskrift tabeller versjon 3.27
- Oppdatert versjon av Acapela TTS
- Be om å åpne USB-tilkobling, satt til alltid som standard
- Fikset et problem der tommeltastene var uberegnetlig registrerte et dobbeltrykk.
- Innholdsstemme skal ikke bli satt til ingen.
- Løs problemer med enkelte macOS-filer som er lagt til i tillegg til legitime bøker eller dokumenter
- Løste et problem der oppdateringer ikke var mulig ved bruk av en macOS.
 - Denne endringen vil bli merkbare fra versjon 2.2