

Brukerveiledning

IR-mottaker 9MP LINAK



IR mottaker IR-9MP LINAK: HMS art. nr.: 028517 Best. nr: 2443010

IR-mottaker 9MP LINAK	1
Beskrivelse	2
Tilkopling av IR-mottaker.....	2
Programmering av kanaler	2
Merking av tastene	2
Rengjøring	4
Tekniske data	4
Overensstemmelse med Medisintekniske Direktivet	4

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no

Beskrivelse

IR-9MP er en programmerbar IR-mottaker tilpasset for å koples til senger med Linak betjening CB-09, CB-10 og CB-12. Maksimalt 8 funksjoner kan styres på sengen.

Tilkopling av IR-mottaker

Kople kabelforgreningen til sengens elektronikk og kople deretter til IR-mottakeren og sengens håndkontroll til forgreningen. IR-mottakeren og håndkontrollen virker parallelt. Heng IR-mottakeren på sengens understell. Plasser IR-mottakeren slik at mottakerforholdene optimaliseres, rettet ut i rommet. På innsiden av festebraketten er det borrelås for å sikre at mottakeren forblir i riktig posisjon.

Se til at ingen av kablene kommer i klem! Mottakeren drives av strømforsyningen som følger med. Fest kablene med strips som følger med. Kontroller at kablene er lange nok når sengen er hevet i øverste posisjon.

OBS! Rekkevidden avtar hvis detektor-øyet tildekkes av en eller annen grunn, som for eksempel av gardiner eller møbler.



Programmering av kanaler

Mottakeren er fabrikkinnstilt på kanalene 16-23. Mottakeren er innstilt for å fungere sammen med en IR-sender med 8 funksjoner (IR-9SP eller IR-9SO), men om en annen sender eller andre kanaler skal benyttes må IR-mottakerens kanaler programmeres om. Det gjøres på følgende måte:

Trykk inn en programmeringsknapp på IR-mottakerens kretskort og trykk samtidig på den tasten på senderen som skal aktivere respektive funksjon på IR-mottakeren. IR-mottakeren lærer seg nå hvilken kanal som sendes. Hvis programmeringsknappen holdes inne ca. 1 sekund, blir funksjonen monostabil. Hvis programmeringsknappen holdes inne i ca. 4 sekunder blir funksjonen bistabil. OBS! Ved betjening av seng får **ingen** funksjoner være bistabile. Mottakeren bekrefter innprogrammeringen ved at indikeringslampen blinker. Fortsett med å programmere de neste utgangene.

Merking av tastene

Etiketter for merking av tastene følger med for senderne IR-9SP, IR-9SO, IR-5SP og IR-5SO. Fjern forsiktig fingerguiden. Ta bort beskyttelsesfolien på etiketten over tastene og klistre på etikettene. Legg deretter på beskyttelsesfolien over merkeetikettene. Sett på fingerguiden.

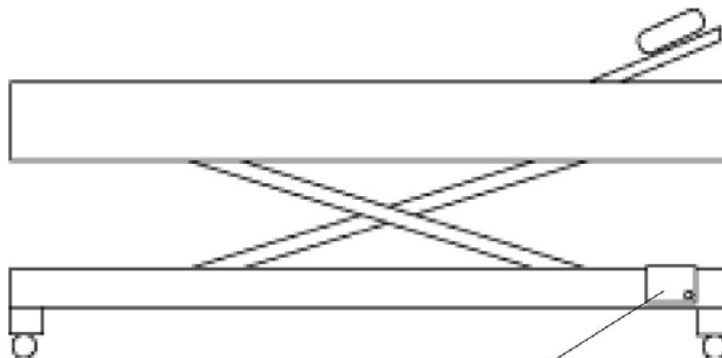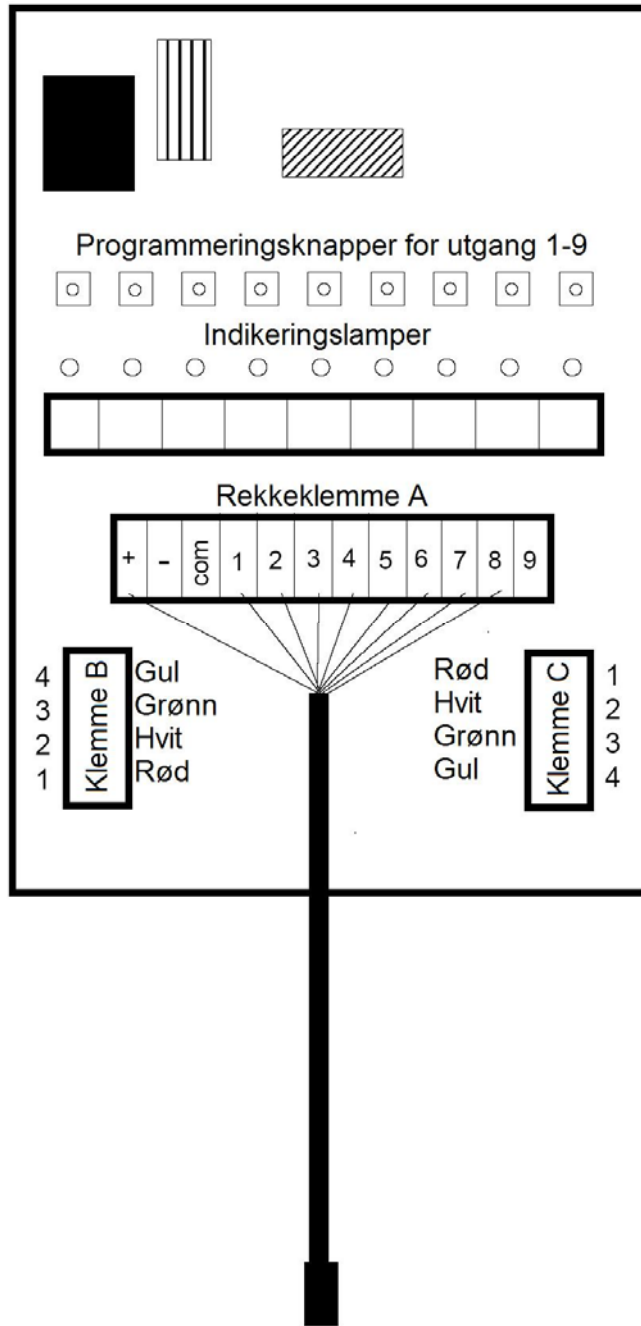

IR-mottageren plasseres på understellet.
 Sørg for at IR-øyet har fri sikt.

Rengjøring

Mottakerens holdes ren ved å bli tørket av med en **godt oppvridd klut** med mildt såpevann. Etter rengjøringen tørkes den av med en tørr klut.

Tekniske data

Driftsspenning:	12-24 V DC
Maks. strømforbruk i hvile:	11 mA
Maks. relébelastning per utgang:	110 mA
Programmeringskanaler:	GewaLink-kanalene 0-127 (kanal 62 har ingen funksjon) og 4096 kode.
Omgivelsetemperatur:	-40° - +40°C,

Overensstemmelse med Medisintekniske Direktivet

IR 9MP Linak markedsføres som et teknisk hjelpemiddel for handikappede og oppfyller kravene i det Medisinsktekniske direktivet 93/42/EEC noe som for eksempel inkluderer relevante krav for EMC og elektrisk sikkerhet.

