

Tilpasningsguide

BAK-ØRET-HØREAPPARATER

Super Power BTE



Tilpasningsguide


Super Power BTE høreapparater

Innhold

Oversikt	5
Tilpasningsområde	5
Montere høyre/venstre-markering	6
Montere og fjerne hook	6
Bytte filter i hooken	7
Bytte batteriluke	7
DAI/FM-adapter	9
Sette på DAI/FM-adapter	9
Benytte FM-adapter	9
Benytte DAI-adapteren	10
Tilpasse Super Power BTE med Oasis	11
Tilkobling av programmeringskabler	11
Bestillingsinformasjon	12


Oversikt

Super Power BTE høreapparatet er ment for brukere med store og svært store hørselstap. Denne guiden vil hjelpe deg gjennom tilpasningen og betjeningen av Super Power BTE høreapparatet.

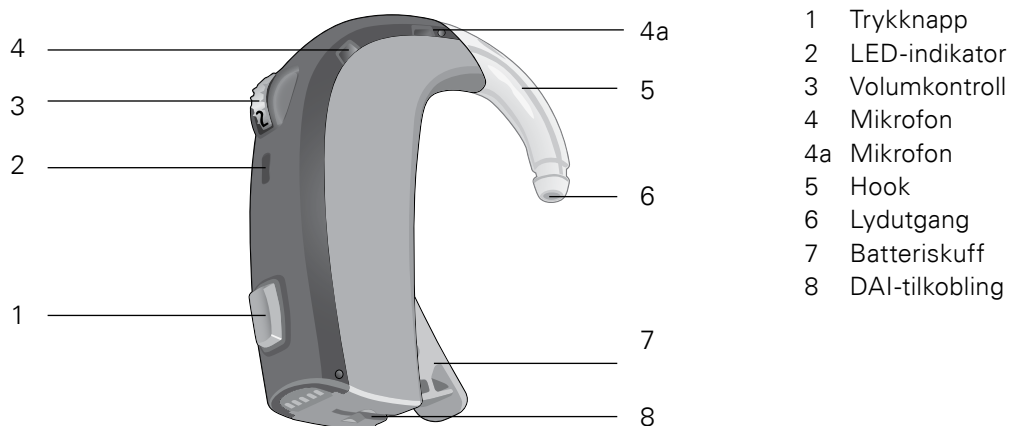


Tilpasningsområde

Tilpasningsområdet til Super Power høreapparatet vises nedenfor.

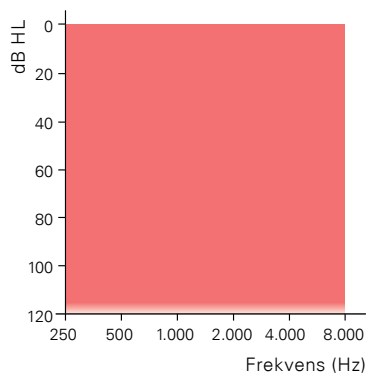

Montere høyre/venstre-markering


- 1 Åpne batteriskuffen.
- 2 Plasser markeringen som vist under.
- 3 Vri og roter pinnen for å brette av markeringen.
- 4 Lukk batteriskuffen.

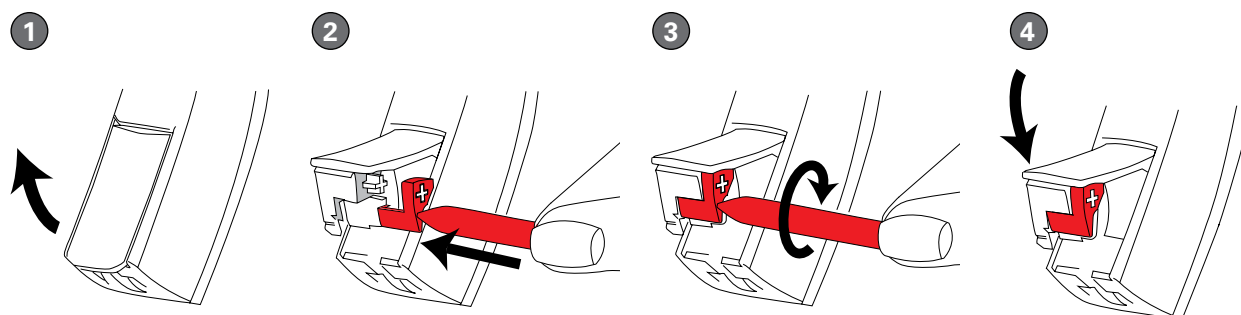

Montere og fjerne hook


Super Power høreapparatet er tilgjengelig med både en standard hook for voksne eller en egen hook for barn. Samme metode benyttes for å skifte begge.

- 1 Bruk den spisse enden av verktøyet for å trykke ut låsepinnen.
- 2 Bytt hook.
- 3 Sett på låsepinnen (pinsett gjør det enklere).

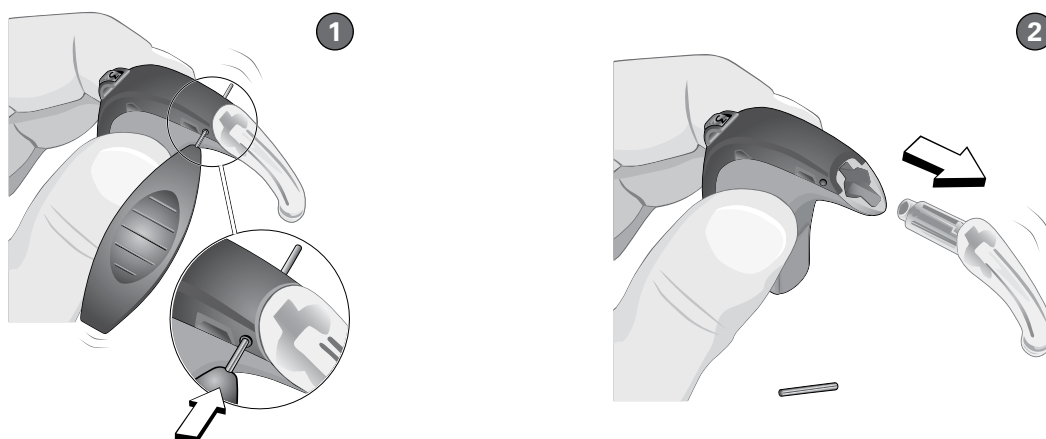


Bytte filter i hooken

- 1 Ta et nytt filter fra brettet.
- 2 Stikk den tomme enden inn i det filteret som skal erstattes og trekk det ut.
- 3 Dytt et nytt filter inn i hooken.
- 4 Kast delen med det brukte filteret.

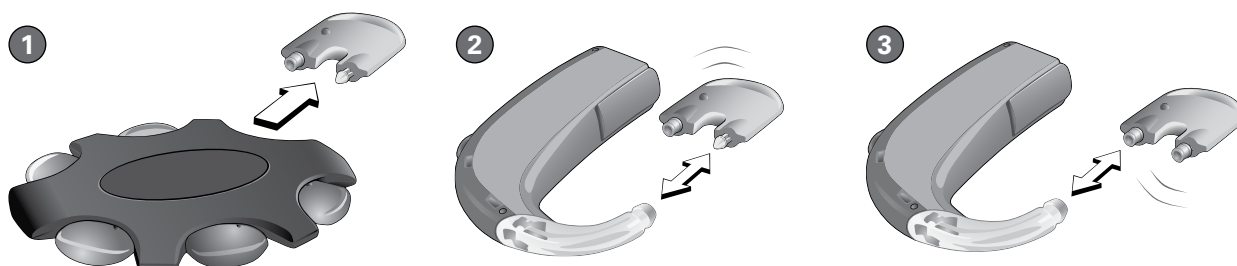

Bytte batteriluke

- 1 Åpne batteriluken og fest verktøyet som vist under.
- 2 Dra forsiktig batteriluken av.
- 3 Klikk den nye batteriluken på plass og lukk.

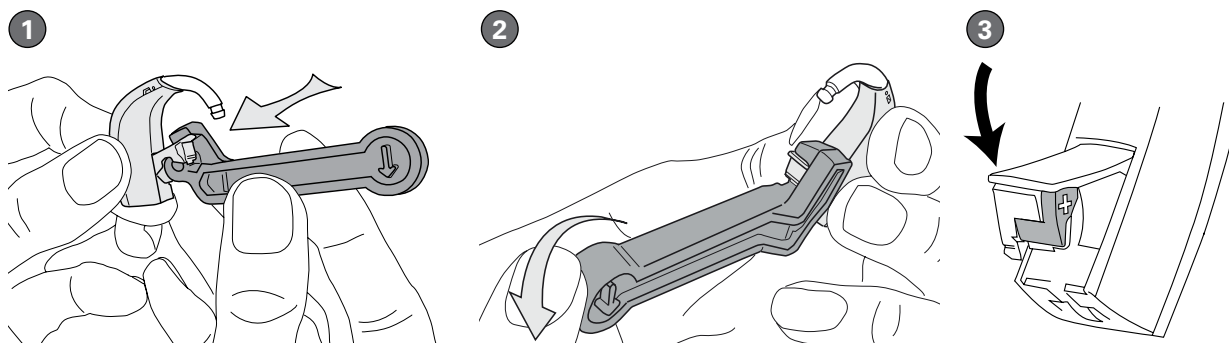


Låsbar batteriskuff

Super Power BTE-apparatet har mulighet for å benytte en låsbar batteriskuff. Denne må bestilles separat. En låsbar batteriskuff bør brukes når apparatet skal tilpasses små barn.


For å låse batteriskuffen, lukk først batteriskuffen helt. Bruk deretter en liten skrutrekker og vri låsen slik at streken ligger horisontalt. For å åpne, vri låsen til streken står vertikalt.

Dytt med skrutrekkeren for å skyve opp batteriskuffen.


Låst

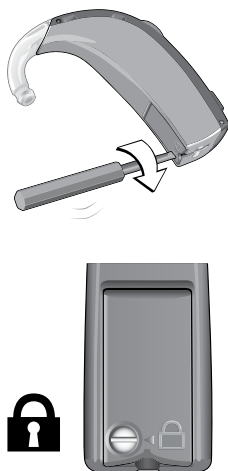

Åpen

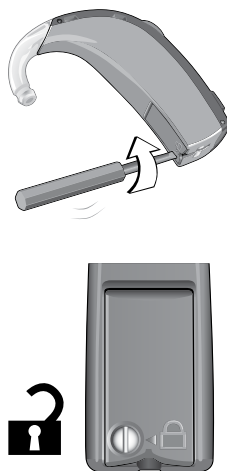


Åpne låsbar batteriskuff

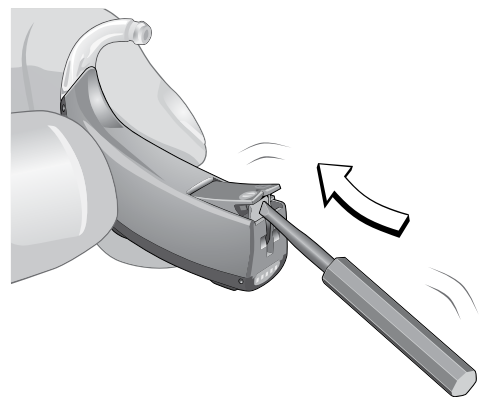

DAI/FM-adapter

Sette på DAI/FM-adapter

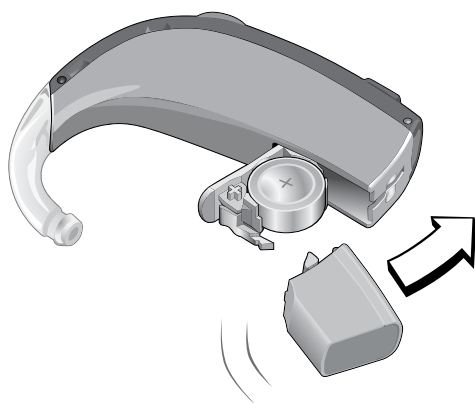

- 1 Åpne batteriskuffen.
- 2 Skyv DAI/FM-adapteren inn på sporet slik at adapteren flukter med apparatet.
- 3 Lukk batteriskuffen og koble til ønsket tilbehør.

Benytte FM-adapter


Super Power-høreapparatet er kompatibelt med en rekke FM-systemer (FM receivers). Tilkobling gjøres via Europlug.

Bruk også FM-adapteren når du skal koble til en CROS-mikrofon.

Benytte DAI-adapteren


Direct Audio Input (DAI) gjør det mulig for høreapparatet å motta lyd direkte fra eksterne enheter som en TV, radio, PC, MP3-spiller etc.

DAI-adapteren benytter en Europlug-kontakt for å koble til en ekstern enhet via en DAI-kabel.

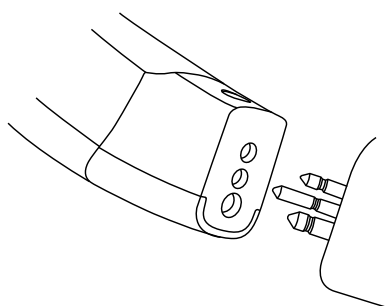


DAI-adapteren innehar to justerbare trimmere.

Bruk den fremre trimmeren til å justere volum.

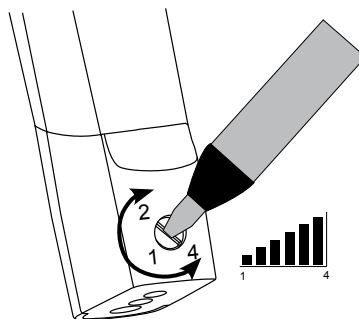

Bruk den øverste trimmeren til å justere inngangsimpedans.

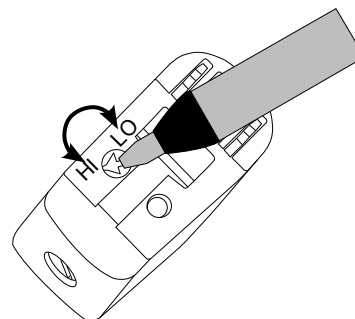

Posisjon HI: TV, radio, MP3-spiller, PC, etc.

Posisjon LO: Kroppsbårne FM-løsninger


Tilpasse Super Power BTE med Oasis

Super Power høreapparatet programmeres i Oasis med kabel merket new standard (nr 2).


Sett alltid inn et nytt batteri før tilpasningen.

For trådløs tilkobling kan nEARcom eller FittingLink benyttes.

Tilkobling av programmeringskabler

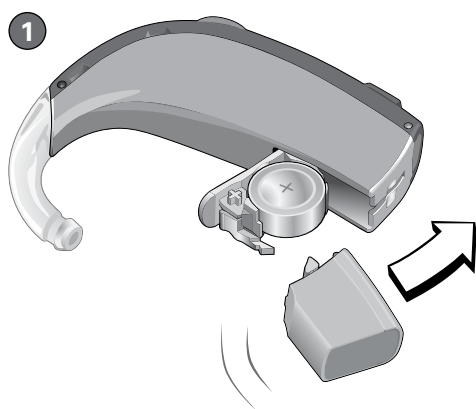

- 1 Åpne batteriskuffen og skyv programmerings-adapteren inn på sporet slik at adapteren flukter med apparatet.

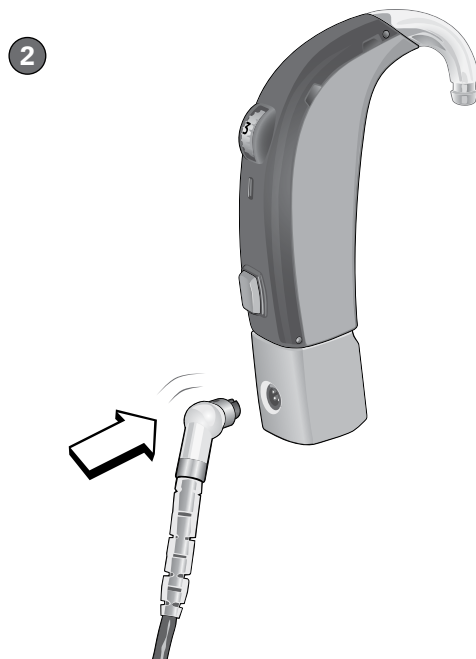

- 2 Lukk batteriskuffen og koble til kabelen som vist.

Bestillingsinformasjon

1. Tilbehør

Artikkelnummer	Beskrivelse	Kommentar
1105001	DAI-adapter	Produkt fra SBO
1105000	FM-adapter	Produkt fra SBO
1101181	CROS-mikrofon	Produkt fra SBO


2. Programmeringsenhet

2.1 Kabler

Artikkelnummer	Beskrivelse	Kommentar
384-20-033-00	Prog. kable, Nr. 2 New standard (HiPro) Blå, venstre	
384-20-032-00	Prog. kabel, Nr. 2 New standard (HiPro) Rød, høyre	
384-20-035-00	Prog. kabel, Nr. 2 New standard (NOAHlink) Blå, venstre	
384-20-034-00	Prog. kabel, Nr. 2 New standard (NOAHlink) Rød, høyre	

2.2 Adapter

Artikkelnummer	Beskrivelse	Kommentar
399-50-640-00	Programmeringsadapter	Benyttes til SP, Micro og Compact Power BTE (CP/CPx)

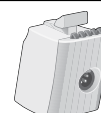

2.3 Tilkoblingsenhet

Artikkelnummer	Beskrivelse	Kommentar
144720	FittingLINK	Trådløs programmeringsenhet. Produkt fra SBO.




3. Reservedeler

3.1 Hook

Artikkelnummer	Beskrivelse	Kommentar
571-01-140-00	Hook for voksne	
106141	Hook for voksne med filter (damper)	
689-30-320-00	Filter (damper)	Brett med 6 filtre


3.2 Høyre/venstre-indikatorer

Artikkelnummer	Beskrivelse	Kommentar
101217	Fargeindikator høyre/venstre	1 rød og 1 blå

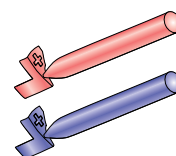

3.3 Verktøy

Artikkelnummer	Beskrivelse	Kommentar
101484	Verktøy til batteriskuff	
890-22-270-00	Verktøy til låsepinne	

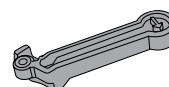

4. Utstyr for tilpasning på barn

4.1 Verktøy

Artikkelnummer	Beskrivelse	Kommentar
145601	Låsbar batteriskuff SR3	
144307	Låsbar batteriskuff SR7	
571-01-110-00	Hook til barn	
106168	Hook til barn med filter (damper)	
152883	YoungStar kit	YoungStar kit inneholder: • Bag med skulderreim • Rense og tørkesett • Rengjøringsklut • Stetoclip • Batteritester • Otoclip • Håndduke, løve • Guide - høreapparat til barn

Notater

[illegible]

Helt siden 1946 har vi vært lidenskapelig opptatt av å utvikle høreapparater som gir mennesker med nedsatt hørsel muligheten til å glede seg over lytteopplevelser av høy kvalitet. Med sveitsisk kvalitet, teknologi og vårt ønske om personlig service, gjør vi alt vi kan for å tilfredsstille kundenes forventninger. Vårt mål er å kunne tilby våre samarbeidspartnere mer enn de forventer hver dag. Bernafons representanter og ansatte i over 70 land oppfyller vår visjon om å hjelpe hørselshemmede til igjen å kunne kommunisere uten begrensninger.

Hovedkontor

Sveits

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Telefon +41 31 998 15 15
Telefaks +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Norge

Gewa AS
Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon 66 99 60 00
Telefaks 66 80 94 90
www.gewa.no

SWISS 
Engineering

Bernafon Companies

Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing • Our passion