

Westerstrand Urfabrik AB

CANTEC

- helping people

# Timstock

## Brukerveiledning



---

*Fjerde generasjon*




***Vi har all tid til deg***

## Beskrivelse

Westerstrands Timstock visualiserer og gjør det enklere å forstå det abstrakte begrepet tid. Når tiden går, slukkes diodene i tidslinjen, én etter én til tiden er ute og Timstock-lyden signaliserer. Regelmessig bruk av enheten kan hjelpe deg med å utvikle oppfatningen av tid samt redusere stress og frustrasjon i hverdagen.

Timstocken er støv- og vanntett og kan brukes innendørs, utendørs og i dusjen. Skal enheten brukes til svømming, anbefales det å bruke beskyttelsesveske med innebygget flytepute, denne finnes som tilleggsutstyr. Bruk av beskyttelsesvesken gjør at Timstocken flyter.

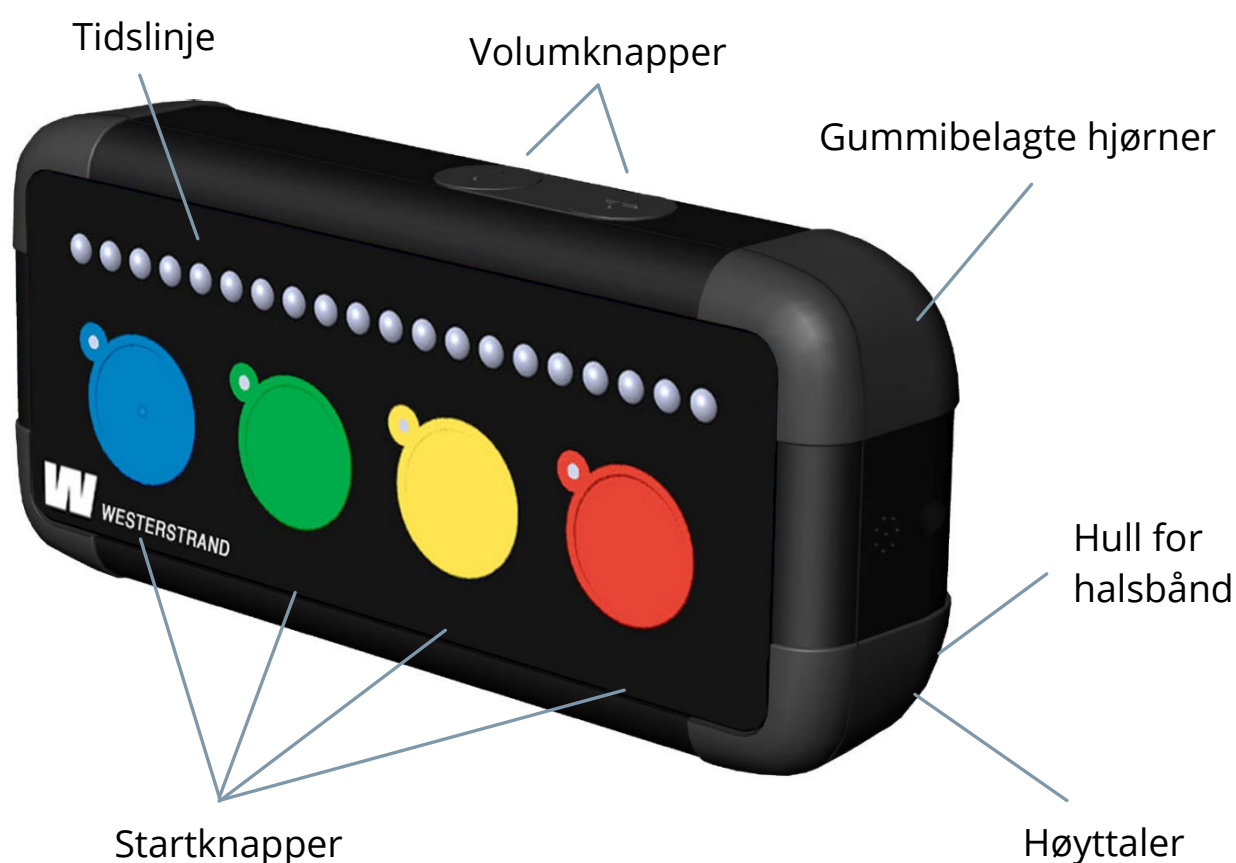

# Kom i gang

## Still inn tiden

Trykk på en av startknappene (rød, gul, grønn eller blå) som tilsvarer ønsket tid. LED-ene lyser og nedtellingen starter. Ved siden av hver startknapp lyser også en liten diode for å vise valgt tid.

## Volum

Trykk på knappene på toppen for å øke eller senke alarmsignalets lydstyrke. Volumet har 8 forskjellige nivå. Når høyeste eller laveste volum er nådd vibrerer enheten i 1 sekund.

Trykk **+** for å øke volumet

Trykk **-** for å senke volumet

For lydløst modus, hold **-** inne i 1,5 sek.

For maks volum hold **+** inne i 1,5 sek.

## Funksjon

Nedtellingen visualiseres ved at de røde lysdiodene i tidslinjen slukkes, én etter én, etter hvert som tiden går. For å indikere at den valgte tiden har gått ut, signaliserer timeren med blinkende dioder, piping og vibrasjon i noen sekunder. Starttiden kan slettes ved å holde på de røde og blå startknappene samtidig i 2 sekunder og deretter slippe. Deretter kan en ny nedtelling startes.

## Batteridrift

Timstocken drives med to stk AA-batterier. Produktet leveres med batterier. Disse holder til ca 60 timers bruk før de må byttes.

Når LED-ene begynner å bli svake, bør begge batteriene skiftes ut med nye. Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke Timstocken over en lengre periode.



Skrue til batterideksel

Skrue til batterideksel

### Slik bytter du batterier:

1. Løsne skruene i batteridekselet med en liten Phillips-skrutrekker.
2. Bytt ut de gamle batteriene med nye AA-batterier.  
Kontroller polariteten slik at + og - blir korrekt.
3. Skru igjen batteridekselet. Batteridekselet passer kun i en retning.

# Teknisk spesifikasjon

## Forpakningen inneholder:

1 x Timstock

2 x Batterier, type AA

1 x Halsbånd

1 x Brukerveiledning

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Dimensjoner:</b>         | 105x47x28 mm                  |
| <b>Vekt:</b>                | 75,2 g (eks. batterier)       |
|                             | 121 g (inkl. batterier)       |
| <b>Strømkilde</b>           | 2 stk. 1,5V R6 / AA-batterier |
| <b>Omgivelsestemperatur</b> | -10°C till +40°C              |
| <b>IP-grad</b>              | IP67 (støv- og vanntett)      |

| Startknapp-farger   | Timstockmodeller |        |        |        |       |
|---|------------------|--------|--------|--------|-------|
|   | 8                | 20     | 60     | 80     | 8     |
|  | 2 min            | 5 min  | 15 min | 20 min | 2 tim |
|  | 4 min            | 10 min | 30 min | 40 min | 4 tim |
|  | 6 min            | 15 min | 45 min | 60 min | 6 tim |
|  | 8 min            | 20 min | 60 min | 80 min | 8 tim |

# Vedlikehold


## Rengjøring

Ved rengjøring, tørk av Timstocken med en fuktig og lofri klut med mildt, lunkent såpevann, eller med en renseklut beregnet for elektronikk.

## Miljø & Garanti

Produsenten gir 1 års garanti for produksjonsfeil. Garantien dekker ikke brukerfeil.



Timstock inneholder elektronikk og må derfor gjenvinnes som elektronisk avfall. Dette kan leveres vanligvis til din  gjenvinningsstasjon, ta kontakt med kommunen din dersom du er usikker.



”För Sverige uppfyller **Westerstrand Urfabrik AB** våra plikter enligt lagen om producentansvar för el-avfall genom att vara anslutna till elretur”



[Grønt Punkt Norge](http://www.grontpunkt.no/) er en nasjonal “non-profit”, medlemsbasert organisasjon for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. **Cantec AS** er sertifisert medlem av Grønt Punkt Norge. Vi jobber for å begrense plast og emballasje i driften vår.

[www.grontpunkt.no/](http://www.grontpunkt.no/)



**Cantec AS** er medlem av [Norsirk](http://www.norsirk.no/) som er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. [www.norsirk.no/](http://www.norsirk.no/)

# Sikkerhet

## Hull for halsbånd



På på den ene siden av Timstocken er det et hull hvor du fester snoren for å bære Timstocken rundt halsen. Bruk kun det originale tilbehøret som følger med Timstocken for å unngå fare for kvelning og annen skade.

Produktet må ikke brukes i andre omgivelser eller på annen måte enn foreskrevet.

Batterier inneholder farlige stoffer. Hold batteriene utilgjengelig for uautoriserte personer.

Kontakt produsenten eller leverandøren umiddelbart ved skade på produktet eller hvis det er fare for skade.

Nyeste versjon av brukerveiledningen og mer informasjon er tilgjengelig for nedlasting på: [www.westerstrand.se](http://www.westerstrand.se) og [www.cantec.no](http://www.cantec.no)

Produsent av svenske kvalitetsprodukter siden 1906



**PRODUSENT**

**Westerstrand Urfabrik AB**

Verkstadsgatan 1  
545 31 Töreboda

[info@westerstrand.se](mailto:info@westerstrand.se)

0506-480 00

[www.westerstrand.se](http://www.westerstrand.se)

[Westerstrand Urfabrik AB](#)  
[Tid- & Resultatanläggningar](#)

Westerstrand Urfabrik AB



**DISTRIBUTØR I NORGE**

**Cantec AS**

Sofiemyrveien 4, 1412 SOFIEMYR,  
postboks 626, 1411 KOLBOTN

[post@cantec.no](mailto:post@cantec.no)

66 99 60 00

[www.cantec.no](http://www.cantec.no)

[Cantec AS](#)

**DOK11084no01**