

# Varslingshjelpemidler

Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet.

Vi har i dag et bredt spekter av radiobaserte (trådløse) alarmer som gir økt trygghet for den enkelte og krever liten eller ingen installasjon.



# Kontaktpersoner



Ta gjerne kontakt med oss i Gewa på tlf. 66 99 60 00 eller send en e-post til [salg@gewa.no](mailto:salg@gewa.no). Mer informasjon om produktene, brukerveiledninger m.m. finner du på [www.gewa.no](http://www.gewa.no).

## Alexander Larsen-Lund

Produktansvarlig/Salgskonsulent  
**VARSLING**

Tlf.: 90 75 86 93

E-post: [all@gewa.no](mailto:all@gewa.no)



## Gorm Folkestad

Produktansvarlig  
**VARSLING**

Tlf.: 91 61 46 17

E-post: [gf@gewa.no](mailto:gf@gewa.no)



# INNHALDSFORTEGNELSE



Epileptiske anfall i seng .....	s. 4 - 7
Epileptiske anfall i stol .....	s. 8 - 11
Vandring - bruker selv skal varsle .....	s. 12 - 13
Trygghet - enkel tilkalling .....	s. 14 - 15
Varsling epileptiske anfall ute .....	s. 16
Trygghet - video-overvåkingssystem (trådløst) .....	s. 17 - 19
Trygghet - video-overvåkingssystem (trådbundet) .....	s. 20 - 21
Trygghet - lydovervåking .....	s. 22
Viderevarsling - internt .....	s. 23
Viderevarsling - eksternt .....	s. 24
Komfyrvakt .....	s. 25
Tilbehør og reservedeler.....	s. 26

# Epileptiske anfall i seng

Ved anfall i seng kan Gewa levere systemer med god kvalitet og rekkevidde (433 MHz). Systemet er radiobasert og enkelt i bruk. Det er portabelt og lett å ta med seg på reise/avlastning. 433-systemet er et godt trådløst overføringssystem som fremdeles leveres hvis man har komponenter fra før i denne serien.

## Ulike SENDERE - rekkevidde ca. 75 m

Knop EPI 2000 vibrasjonsdetektor  
HMS nr. 020724/Best.nr. 2223234



## MOTTAKER


Knop RX 300 Alarmmottaker m/vibrator  
HMS nr. 135563/Best.nr. 2223486



Knop BW 2009 registrerer fukt  
HMS nr. 189350/Best.nr. 2223294



Knop LAK 821 stemmestyrte sender/bryter  
HMS nr. 135562/Best.nr. 2223466

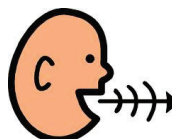

Knop PIR 2003 bevegelsesdetektor  
HMS nr. 020753/Best.nr. 2223227



<p>HMS nr. 135563 Best. nr. 2223486</p>	<h2>Alarmmottaker RX 300 m/vibrator</h2>
	<p>Denne bærbare radiomottakeren kan motta inntil 99 forskjellige alarmer. Knop-serien inneholder en rekke forskjellige radiosendere som kan koples opp mot denne trådløse mottakeren. Når brukeren har utløst alarm, angis hvilken alarm/sender som er mottatt og dermed ser man hvilken bruker som har sendt alarmen. Mottakeren leveres med belteklips og har oppladbare batterier.</p>
<p>HMS nr. 020724 Best. nr. 2223234</p>	<h2>Knop EPI 2000, vibrasjonsdetektor</h2>
	<p>Epilepsialarm Knop type EPI-2000 er en vibrasjonsdetektor som enkelt henges opp under sengen og har trådløs (radio)overføring til mottakeren. Epilepsialarmen er spesielt utviklet for å registrere rystelser som oppstår ved epileptiske anfall (torisk-/klonisk-/grand mal anfall). Ved utløst alarm overføres signalet trådløst til mottakeren. Ekstra føler kan koples til for å øke følsomheten. Den plasseres under lakenet i sengen.</p>
<p>HMS nr. 189350 Best. nr. 2223294</p>	<h2>Knop BW 2009, registrerer fukt</h2>
	<p>Dette er en brukervennlig fuktalarm hvor man skifter fuktlaken og stiller inn følsomheten ved enkle grep. Den sender signal til mottakeren, men kan også gi beskjed til brukere via lydalarm. Fuktlakenet er enkelt å kople i fra for rengjøring. (Kan også brukes som enuresis alarm.)</p>
<p>HMS nr. 135562 Best. nr. 2223466</p>	<h2>Knop LAK 821, stemmestyrte sender/bryter</h2>
	<p>Stemmestyrte sender/bryter LAK 821 er laget for å hjelpe bruker til å få gitt melding i de tilfellene brukeren ikke er i stand til å betjene et signalanlegg på ordinær måte. Den kan også benyttes til å detektere anfall med lyd.</p> <p>Ekstra mikrofon kan koples til ved svak stemme eller når LAK 821 er vanskelig å plassere ved sengen.</p>
<p>HMS nr. 020753 Best. nr. 2223227</p>	<h2>Sengealarm PIR 2003, bevegelsesdetektor</h2>
	<p>Sengealarm/sengevakt PIR-2003 er en PIR-detektor som plasseres på gulvet ved sengen. Alarmen er en radiobasert sender som sender signal dersom noen forlater sengen om natten.</p> <p>Den kan også monteres på dør som en dørvakt.</p>

# Epileptiske anfall i seng

Ved anfall i seng kan Gewa levere systemer med god kvalitet og rekkevidde (869 MHz). Systemet er radiobasert og enkelt i bruk. Det er portabelt og lett å ta med seg på reise/avlastning. 900-serien er en videreutvikling av 433-systemet og disse systemene snakker IKKE sammen. Vi anbefaler å benytte 900-serien ved nye komplette anskaffelser.

## Ulike SENDERE - rekkevidde ca. 75 m


Knop EPI 900 vibrasjonsdetektor  
HMS nr. 189344/Best.nr. 2223283



Knop BW 900 registrerer fukt  
HMS nr. 189349/Best.nr. 2223293



Knop LAK 900 stemmestyrte sender/bryter  
HMS nr. 189345/Best.nr. 2223284

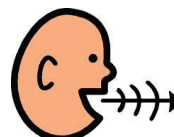

Knop PIR 900 bevegelsesdetektor  
HMS nr. 189346/Best.nr. 2223285



## MOTTAKER

Knop RX 900-LED Alarmmottaker m/vibrator  
HMS nr. 189348/Best.nr. 2223288





<p>HMS nr. 189348 Best.nr. 2223288</p>	<p><b>Alarmmottaker RX 900-LED m/vibrator</b></p>
	<p>Denne bærbare radiomottakeren kan motta inntil 400 forskjellige alarmer. Knop-serien inneholder en rekke forskjellige radiosendere. Når brukeren har utløst alarm, angis hvilken alarm/sender som er mottatt og dermed ser man hvilken bruker som har sendt alarmen. Den er også en sender for å kunne tilkalle hjelp fra en kollega.</p> <p>Mottakeren leveres med belteklips og har oppladbare batterier.</p>
<p>HMS nr. 189344 Best.nr. 2223283</p>	<p><b>Knop EPI 900 vibrasjonsdetektor</b></p>
	<p>Epilepsialarm Knop type EPI 900 er en vibrasjonsdetektor som enkelt henges opp under sengen og har trådløs (radio) overføring til mottakeren. Epilepsialarmen er spesielt utviklet for å registrere rystelser som oppstår ved epileptiske anfall (torisk - klonisk - grand mal anfall). Ved utløst alarm overføres signalet trådløst til mottakeren. Ekstra føler kan koples til for å øke følsomheten.</p>
<p>HMS nr. 189349 Best. nr. 2223293</p>	<p><b>Knop BW 900, registrerer fukt</b></p>
	<p>Dette er en brukervennlig fuktalarm hvor man skifter fuktlaken og stiller inn følsomheten ved enkle grep. Den sender signal til mottakeren, men kan også gi beskjed til brukere via lydalarm. Fuktlakenet er enkelt å kople i fra for rengjøring. (Kan også brukes som enuresis alarm.)</p>
<p>HMS nr. 189345 Best.nr. 2223284</p>	<p><b>Knop LAK 900, stemmestyrte sender/bryter</b></p>
	<p>Stemmestyrte bryter LAK 900 er laget for å hjelpe bruker til å få gitt melding i de tilfellene brukeren ikke er i stand til å betjene et signalanlegg på ordinær måte. Den kan også benyttes til å detektere anfall med lyd.</p> <p>Ekstra mikrofon kan koples til ved svak stemme eller når LAK 900 er vanskelig å plassere ved sengen.</p>
<p>HMS nr. 189346 Best.nr. 2223285</p>	<p><b>Sengealarm PIR 900, bevegelsesdetektor</b></p>
	<p>Sengealarm/sengevakt PIR 900 fabrikket Knop er en PIR-detektor som plasseres på gulvet ved sengen. Alarmen er en radiobasert sender som sender signal dersom noen forlater sengen om natten.</p> <p>Den kan også monteres på dør som dørvakt.</p>

# Epileptiske anfall i stol

Ved anfall i stol kan Gewa levere systemer med god kvalitet og rekkevidde (433 MHz). Systemet er radiobasert og enkelt i bruk. Det er portabelt og lett å ta med seg på reise/avlastning. 433-systemer er et godt trådløst overføringsystem som fremdeles leveres hvis man har komponenter fra før i denne serien.

## Ulike SENDERE - rekkevidde ca. 75 m

Knop EPI 2000 vibrasjonsdetektor  
HMS nr. 020724/Best.nr. 2223234




## MOTTAKER


Knop RX 300 Alarmmottaker m/vibrator  
HMS nr. 135563/Best.nr. 2223486



Knop BW 2009 registrerer fukt  
HMS nr. 189350/Best.nr. 2223294

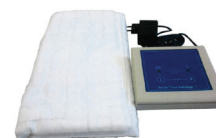

Knop LAK 821 stemmestyrte sender/bryter  
HMS nr. 135562/Best.nr. 2223466

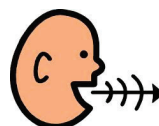

Knop TX 12MD Fallalarm  
HMS nr. 189339/Best.nr. 2223225





<p>HMS nr. 135563 Best. nr. 2223486</p>	<h2>Alarmmottaker RX 300 m/vibrator</h2>
	<p>Denne bærbare radiomottakeren kan motta inntil 99 forskjellige alarmer. Knop-serien inneholder en rekke forskjellige radiosendere. Når brukeren har utløst alarm, angis hvilken alarm/sender som er mottatt og dermed ser man hvilken bruker som har sendt alarmen.</p> <p>Mottakeren leveres med belteklips og har oppladbare batterier.</p>
<p>HMS nr. 020724 Best. nr. 2223234</p>	<h2>Knop EPI 2000, vibrasjonsdetektor</h2>
	<p>Epilepsialarm Knop type EPI-2000 er en vibrasjonsdetektor som enkelt henges opp under sengen og har trådløs (radio)overføring til mottakeren. Epilepsi-alarmen er spesielt utviklet for å registrere rystelser som oppstår ved epileptiske anfall (torisk - klonisk - grand mal anfall). Ved utløst alarm overføres signalet trådløst til mottakeren.</p>
<p>HMS nr. 189350 Best. nr. 2223294</p>	<h2>Knop BW 2009, registrerer fukt</h2>
	<p>Dette er en brukervennlig fuktalarm hvor man skifter fuktlaken og stiller inn følsomheten ved enkle grep. Den sender signal til mottakeren, men kan også gi beskjed til brukere via lydalarm. Fuktlakenet er enkelt å kople i fra for rengjøring. (Kan også brukes som enuresis alarm.)</p>
<p>HMS nr. 135562 Best. nr. 2223466</p>	<h2>Knop LAK 821, stemmestyrte sender/bryter</h2>
	<p>Stemmestyrte sender/bryter LAK 821 er laget for å hjelpe bruker til å få gitt melding i de tilfellene brukeren ikke er i stand til å betjene et signalanlegg på ordinær måte. Den kan også benyttes til å detektere anfall med lyd.</p> <p>Ekstra mikrofon kan koples til ved svak stemme eller når LAK 821 er vanskelig å plassere nær bruker.</p>
<p>HMS nr. 189339 Best. nr. 2223225</p>	<h2>Knop TX 12MD Fallalarm</h2>
	<p>Denne mini-fallalarmen er godt egnet for varsling på institusjon eller bolig. Rekevidden avhenger av om det er fri sikt. Den varsler ved at bruker selv trykker eller at fallalarmen er over 60° i over 2 sekunder.</p> <p>Den programmeres enkelt opp mot hvilken som helst mottager med samme frekvens (433MHz).</p>

# Epileptiske anfall i stol

Ved anfall i stol kan Gewa levere systemer med god kvalitet og rekkevidde (869 MHz). Systemet er radiobasert og enkelt i bruk. Det er portabelt og lett å ta med seg på reise/avlastning. 900-serien er en videreutvikling av 433-systemet og disse systemene snakker IKKE sammen. Vi anbefaler å benytte 900-serien ved nye komplette anskaffelser.

## Ulike SENDERE - rekkevidde ca. 75 m

Knop EPI 900 vibrasjonsdetektor  
HMS nr. 189344/Best.nr. 2223283




## MOTTAKER


Knop RX 900-LED Alarmmottaker m/vibrator  
HMS nr. 189348/Best.nr. 2223288



Knop BW 900 registrerer fukt  
HMS nr. 189349/Best.nr. 2223293

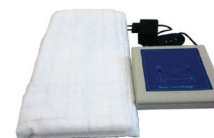

Knop LAK 900 stemmestyrte sender/bryter  
HMS nr. 189345/Best.nr. 2223284

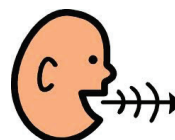

Knop MTC 900 fallalarm  
HMS nr. 189342/Best.nr. 2223271



<p>HMS nr. 189348 Best.nr. 2223288</p>	<p><b>Alarmmottaker RX 900-LED m/vibrator</b></p>
	<p>Denne bærbare radiomottakeren kan motta inntil 400 forskjellige alarmer. Knop-serien inneholder en rekke forskjellige radiosendere. Når brukeren har utløst alarm, angis hvilken alarm/sender som er mottatt og dermed ser man hvilken bruker som har sendt alarmen. Den er også en sender for å kunne tilkalle hjelp fra en kollega. Mottakeren leveres med belteklips og har oppladbare batterier.</p>
<p>HMS nr. 189344 Best.nr. 2223283</p>	<p><b>Knop EPI 900 vibrasjonsdetektor</b></p>
	<p>Epilepsialarm Knop type EPI 900 er en vibrasjonsdetektor som enkelt henges opp under sengen og har trådløs (radio)overføring til mottakeren. Epilepsialarmen er spesielt utviklet for å registrere rystelser som oppstår ved epileptiske anfall (torisk - klonisk - grand mal anfall). Ved utløst alarm overføres signalet trådløst til mottakeren.</p>
<p>HMS nr. 189349 Best. nr. 2223293</p>	<p><b>Knop BW 900, registrerer fukt</b></p>
	<p>Dette er en brukervennlig fuktalarm hvor man skifter fuktlaken og stiller inn følsomheten ved enkle grep. Den sender signal til mottakeren, men kan også gi beskjed til brukere via lydalarm. Fuktlakenet er enkelt å kople i fra for rengjøring. (Kan også brukes som enuresis alarm.)</p>
<p>HMS nr. 189345 Best.nr. 2223284</p>	<p><b>Knop LAK 900, stemmestyrte sender/bryter</b></p>
	<p>Stemmestyrte bryter LAK 900 er laget for å hjelpe bruker til å få gitt melding i de tilfellene brukeren ikke er i stand til å betjene et signalanlegg på ordinær måte. Den kan også benyttes til å detektere anfall med lyd. Ekstra mikrofon kan koples til ved svak stemme eller når LAK 900 er vanskelig å plassere nær bruker.</p>
<p>HMS nr. 189342 Best.nr. 2223271</p>	<p><b>Knop MTC 900, Fallalarm</b></p>
	<p>Denne mini fallalarmen er godt egnet for varsling på institusjon eller i bolig. Den varsler ved at bruker selv trykker eller at fallalarmen er over 60° i over 2 sekunder. Rekkevidden avhenger av om det er fri sikt.</p> <p>Den programmeres enkelt opp mot hvilken som helst mottaker med samme frekvens (869 MHz).</p>

# Vandring - bruker selv skal varsles

Effektiv måte å gi en enkel talemelding til den som er ute på vandring.

Bryter tale Smooth Talker  
HMS nr. 177899/Best.nr. 1136760






Knop TR 401 tråkke-/alarmmatte  
HMS nr. 136047/Best.nr. 2223230



Knop PIR 900 bevegelsesdetektor/dørvakt  
HMS nr. 189346/Best.nr. 2223285



<p>HMS nr. 177899 Best.nr. 1136760</p>	<p><b>Bryter Tale Smooth Talker, Pretorian Simply Works</b></p>
	<p>Dette er en bryter som du kan spille inn tale på. Du har 2 minutter til rådighet, og du kan legge inn så lang melding du vil innenfor de 2 minuttene.</p> <p>Den aktiveres med en impuls fra tråkke-/alarmmatte eller Knop Pir 900. Deretter leser den opp den innspilte beskjednen. (F.eks. «Nå er det natta, gå til sengs igjen.»)</p>
<p>HMS nr. 136047 Best.nr. 2223230</p>	<p><b>Knop TR 401 Tråkke-/alarmmatte</b></p>
	<p>Knop alarmmatte legges foran seng, dør eller lignende. Når bruker tråkker på matten, gir dette en elektrisk kontakt. Denne impulsen setter i gang talemeldingen på Smooth Talker.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Størrelse: 400 x 700 mm.</li><li>• Leveres med 2 m ledning og 3,5 mm mini jack plugg.</li></ul>
<p>HMS nr. 189346 Best.nr. 2223285</p>	<p><b>Sengealarm PIR 900, bevegelsesdetektor/dørvakt</b></p>
	<p>Sengealarm/sengevakt PIR 900 er en PIR-detektor som plasseres på gulvet ved sengen eller på dørkarm.</p> <p>Når alarmen aktiveres, setter den i gang talemeldingen på Smooth Talker.</p>



# Trygghet - enkel tilkalling

Tilkall hjelp ved et trykk på knappen.

Knop RX 300 Alarmmottaker m/vibrator  
HMS nr. 135563/Best.nr. 2223486



Visonic WT 211 Anropsalarm  
HMS nr. 020733/Best.nr. 2223520






Tilkall hjelp ved bruk av lyd/stemme.

Knop RX 900-LED Alarmmottaker, lys/lyd, vibrering  
HMS nr. 189348/Best.nr. 2223288



Knop LAK 900 stemmestyrte sender/bryter  
HMS nr. 189345/Best.nr. 2223284




HMS nr. 135563 Best. nr. 2223486	<b>Alarmmottaker RX 300 m/vibrator</b>
	<p>Denne bærbare radiomottakeren kan motta inntil 99 forskjellige alarmer. Knop-serien inneholder en rekke forskjellige radiosendere. Når brukeren har utløst alarm, angis hvilken alarm/sender som er mottatt og dermed ser man hvilken bruker som har sendt alarmer.</p> <p>Mottakeren leveres med belteklips og har oppladbare batterier.</p>
HMS nr. 020733 Best.nr. 2223520	<b>Visonic WT 211 Anropsalarm</b>
	<p>Alarmeren utløses når brukeren trykker på knappen. Dette er en armbåndsender som er sprutsikker.</p> <p>Rekkevidde: 15 - 30 meter.</p>
HMS nr. 189348 Best.nr. 2223288	<b>Alarmmottaker RX 900-LED m/vibrator</b>
	<p>Denne bærbare radiomottakeren kan motta inntil 400 forskjellige alarmer. Knop-serien inneholder en rekke forskjellige radiosendere. Når noen har utløst alarm, angis hvilken alarm som er mottatt. Den er også en sender for å kunne tilkalle mer hjelp fra en kollega.</p> <p>Mottakeren leveres med belteklips og har oppladbare batterier.</p>
HMS nr. 189345 Best.nr. 2223284	<b>Knop LAK 900, stemmestyrte sender/bryter</b>
	<p>Stemmestyrte sender/bryter LAK 900 er laget for å hjelpe brukere til å få gitt melding i de tilfellene brukeren ikke er i stand til å betjene et signalanlegg på ordinær måte. Rekkevidde ca. 75 m.</p> <p>Ekstra mikrofon kan koples til ved svak stemme eller når LAK 900 er vanskelig å plassere ved brukeren.</p>

# Varsling epileptiske anfall ute

Lommy Personal GPS/GSM er en liten, enkel og brukervennlig Fallalarm/Sporingsenhet med mange muligheter og funksjoner. Den er utviklet for å gi høy personlig sikkerhet både innenfor offentlige institusjoner og til privat bruk. Den er så fleksibel at den alltid kan tilpasses brukernes spesielle behov.

Fallalarm/sporingsenhet Lommy GPS/GSM  
HMS nr. 189341/Best.nr. 2223260



HMS nr. 189341 Best.nr. 2223260	<b>Fallalarm/sporingsenhet Lommy GPS/GSM</b>
	<p>De mange mulighetene i Lommy Personal gjør den til noe spesielt. Ingen annen personlig sporingsenhet kan det samme som Lommy Personal.</p> <p>Du kan til enhver tid se hvor brukeren befinner seg, enten ved hjelp av mobiltlf. eller f.eks. et kart på PC'en på vaktrommet. Nøyaktige posisjoner angis. Ubegrenset rekkevidde. Personalet kan kalle opp brukeren eller brukeren kan selv utløse alarm. Alarmen utløses automatisk ved fall.</p> <p>Mulighetene er så fleksible at Lommy personal alltid vil kunne tilpasses brukerens spesielle behov.</p>

# Trygghet - video-overvåkingssystem (trådløst)





Med Samsungs digitale trådløse teknologi blir det et meget bra bilde uten forstyrrelser. Dette systemet kan gi deg 250 m rekkevidde ved fri sikt. Toveis kommunikasjon. Detekterer lyd. Systemet krever ingen installasjon.



IR Kamera SEB-1019RWP  
HMS nr. 189354/Best.nr. 2227425



Monitor SEW-3036W  
HMS nr. 189353/Best.nr. 2227420

HMS nr. 189354 Best.nr. 2227425	<b>IR Kamera SEB-1019RWP</b>
	Night Vision innenfor 3 m. Det er også nattlys på kamera.
HMS nr. 189353 Best.nr. 2227420	<b>Monitor SEW-3036W</b>
	3,5" TFT fargeskjerm. Mulighet for tilkobling av 4 kameraer og zoom-funksjon. Oppladbare batterier.

# Trygghet - video-overvåkingssystem (trådløst)



Video-overvåking med lyd og bilde via lukket trådløst nett. Nattfunksjon og mulighet for opptak. Dette er et avansert system som krever installasjon.

Skjerm Fujitsu HD 21,5" LCD og aktive høyttalere  
HMS nr. 189357/Best.nr. 2227457



Sony Kamera SNC-CH140 IP HD  
HMS nr. 189355/Best.nr. 2227450







Server Detec Standard - bearbejder/lagrer/overfører info.  
HMS nr. 189356/Best.nr. 2227451



NetGear Trådløs routerpakke, nettverkskobling 2 routere  
antenne ekstern - HMS nr. 189359/Best.nr. 2227470



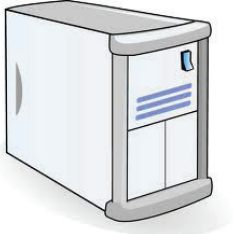

<p>HMS nr. 189357 Best.nr. 2227457</p>	<p><b>Skjerm Fujitsu HD 21,5" LCD og aktive høyttalere</b></p>
	<p>Skjermen er en bakklyst LCD på 21,5 tommer. Den har en oppløsning på 1920x1080 (full HD). Bildet er i 16:9-format, innsynsvinkel og bildekvalitet er på topp. Den er meget energieffektiv.</p> <p>Kompakt par med aktive studiomonitorer på 2x30 watt. Stor lyd i liten innpakning!</p>
<p>HMS nr. 189355 Best.nr. 2227450</p>	<p><b>Sony Kamera SNC-CH140 IP HD</b></p>
	<p>CMOS-bildesensor for HD bildekvalitet. Sonys HD CMOS bildesensor gir utmerket bildekvalitet ved alle oppløsninger opp til 1280x1024 i 16:9-format. Nattfunksjon og autofokus sørger for gode bilder i alle situasjoner.</p>
<p>HMS nr. 189356 Best.nr. 2227451</p>	<p><b>Server Detec Standard - bearbeider/lagrer/overfører info.</b></p>
	<p>Dette er en robust videoserver. Den er selve «hjernen» i systemet. Med 160GB harddisk for operativsystem og video er den mer en stor nok. Den kommer med en Intel-prosessor og kjører Windows 7.</p>
<p>HMS nr. 189359 Best.nr. 2227470</p>	<p><b>NetGear Trådløs routerpakke - nettverkskobling, 2 routere og antenne ekstern</b></p>
	<p>Med dette trådløse aksesspunktet i hver ende kan man plassere kameraet langt unna serveren uten kabel.</p> <p>Den eksterne antennen øker rekkevidden med opp til flere kilometer og sikrer god dekning.</p>

# Trygghet - video-overvåkingsystem (trådbundet)



Video-overvåking via kabel. God lyd og bilde i HD. Nattfunksjon og mulighet for opptak. Dette er et avansert system som krever installasjon.


JVC Monitor 17" LCD HD aktive høyttalere  
HMS nr. 189358/Best.nr. 2227459



Sony Kamera SNC-CH140 IP HD  
HMS nr. 189355/Best.nr. 2227450



Server Detec Standard - bearbejder/lagrer/overfører info.  
HMS nr. 189356/Best.nr. 2227451

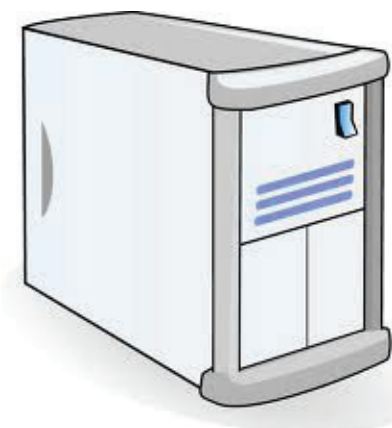

HMS nr. 189358 Best.nr. 2227459	<b>JVC Monitor 17" LCD HD aktive høyttalere</b>
	<p>Denne skjermen fra JVC er utviklet for å gi fremragende visuell ytelse for overvåking og kontrollrom-applikasjoner. Den 17" store skjermen er kompakt og perfekt for overvåking av små og store ITV anlegg. Den kan kobles til videoserverer eller kamera direkte. Stor lyd i liten innpakning!</p> <p>Kompakt par med aktive studiomonitorer på 2x30 watt.</p>
HMS nr. 189355 Best.nr. 2227450	<b>Sony Kamera SNC-CH140 IP HD</b>
	<p>CMOS-bildesensor for HD bildekvalitet. Sonys HD CMOS bildesensor gir utmerket bildekvalitet ved alle oppløsninger opp til 1280x1024 i 16:9-format. Nattfunksjon og autofokus sørger for gode bilder i alle situasjoner.</p>
HMS nr. 189356 Best.nr. 2227451	<b>Server Detec Standard - bearbejder/lagrer/overfører info.</b>
	<p>Dette er en robust videoserver. Den er selve «hjernen» i systemet. Med 160GB harddisk for operativsystem og video er den mer en stor nok. Den kommer med en Intel-prosessor og kjører Windows 7.</p>

Hør hvordan brukeren har det uten å forstyrre.

Overvåkingsystem Knop LAK 900 M sett  
HMS nr. 189340/Best.nr. 2223258

## MIKROFON



## HØYTTALER



HMS nr. 189340  
Best.nr. 2223258

## Overvåkingsystem Knop LAK 900 M sett




Dette er en enkel "babycall" lydovervåker. Mikrofon monteres ved bruker og høyttaler monteres hos "hjelper".

Kvaliteten lydmessig er god, grunnet bruk av kabel mellom enhetene.

# Viderevarsling - internt

Øk rekkevidden innendørs.

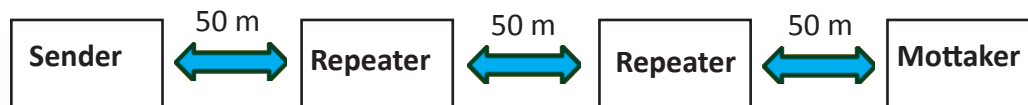

Knop RX 900-2 Mottaker, lys/lyd 2 kanaler  
HMS nr. 189343/Best.nr. 2223273



Knop RP 900 Repeater  
HMS nr. 189347/Best.nr. 2223286



<p>HMS nr. 189343 Best.nr. 2223273</p>	<h2>Knop RX 900-2 Mottaker, lys/lyd 2 kanaler</h2>
	<p>Dette er en 2-kanals mottaker som er egnet til å motta alarmer fra Knop sine sendere i 900-serien (869 MHz)</p> <p>Når alarmen er mottatt, vil den starte og "pipe" og sende et signal tilbake til senderen slik at giver ser at signal er kommet frem</p>
<p>HMS nr. 189347 Best.nr. 2223286</p>	<h2>Knop RP 900 Repeater</h2>
	<p>Har du behov for å sende signalet lenger, kan det monteres en RP 900 Repeater. Denne vil øke rekkevidden med 50 m. Det kan være 2 repetere i et system.</p>



# Viderevarsling - eksternt

Viderevarsleren som kan alt - digitalt og GSM.

Anropsalarm CareIP Mobil, Digital+GSM  
HMS nr. 175756/Best.nr. 2227050



HMS nr. 175756  
Best.nr. 2227050

## Anropsalarm CareIP Mobil, Digital+GSM



CareIP er en ny generasjon trygghetsalarm, der kommunikasjonen skjer digitalt via IP og/eller GSM/GPRS. Den er enkel å installere, med ekte Plug&Play.


Til CareIP finnes det et stort utvalg tilbehør for økt fleksibilitet og individuell tilpasning av den totale trygghetsløsningen. Det er enkelt å kople CareIP til alle våre varslingssystemer.

Trygg på kjøkkenet. La komfyrvakten slå av strømmen hvis noe uforutsett skjer.



Elvakt komfyr Rehab sensor kontrollert komplett  
HMS nr. 189351/Best.nr. 2223635

Elvakt komfyr SE sensor kontrollert, teknisk kontakt komplett  
HMS nr. 189352/Best.nr. 2223640

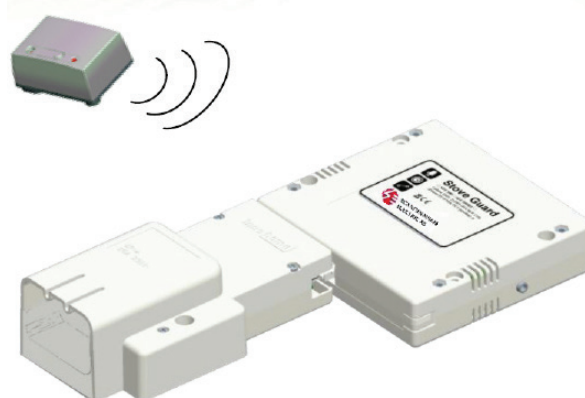

<p>HMS nr. 189351 Best.nr. 2223635</p>	<p><b>Elvakt komfyr Rehab sensor kontrollert komplett</b></p>
	<p>Komfyrvakten er meget driftssikker og det er trådløs kommunikasjon mellom enhetene.</p> <p>Komfyrvakten er utviklet for at man skal kunne montere den selv. Det kreves ingen el.kunnskap.</p>
<p>HMS nr. 189352 Best.nr. 2223640</p>	<p><b>Elvakt komfyr SE sensor kontrollert teknisk kontakt komplett</b></p>
	<p>Denne komfyrvakten er egnet til montering ved utskifting av gammel kontakt.</p> <p>Her må det brukes autorisert elektriker for montering.</p>

# Tilbehør og reservedeler



ISO	Produkt	HMS nr.	Best.nr.
222718	Knop VIB 2004 Vibrator med 3m kabel	136018	2220411
222718	Knop Bryter TR 815 regulerbart trykk		2220412
222718	Knop Magnet 2310 for PIR/TX900-1 TX900-6		2220413
222718	Knop Sokkel PIR 2003/900		2220414
222718	Knop Kabel KA 821M for LAK 821M 10m		2220430
222718	Knop Kabel MK 201 for releutg. EPI 2000/DV2000 3m modulærkont		2220431
222718	Knop Kabel MK 202 for releutg. EPI 2000/DV2000 3m modulær/6,3		2220432
222718	Knop Kabel MK 203 for releutg. EPI/DV 2000, 3m modulær/3,5 rett		2220433
222718	Knop Kabel MK 211 for releutg. EPI/DV2000, 3m modulær/3,5 vinkel		2220434
222718	Knop Kabel MK 212 for releutg. 3m 3,5 vinkel/3,5 Rett		2220435
222718	Knop Kabel MK 900-2RE for releutg. 3m Modulærstikk		2220436
222718	Knop Kabel MK 900-1 for TX900-1, 3m 3,5mm jack		2220437
222718	Knop EPI 2000S Føler for EPI 2000	020720	2223233
222718	Knop RX 2004-R Mottaker m. releutgang	160323	2223235
222718	Knop Repeater PRC-2000RP Repeater lang rekkevidde radio inngang	025762	2223236
222718	Knop Mottaker PRC-2020 Mottaker for PRC-2000	135560	2223237
222718	Knop Repeater PRC-2000 Repeater m/lang rekkevidde kablet inngang	135561	2223238
222718	Knop CT 100 Master Bus Repeater Master 433		2223245
222718	Knop SL 100 Slave Bus Repeater Slave 433		2223250
222718	Knop LAK 900 Audio		2223257
222718	Knop LAK 821 M Audiomonitor		2223257
222718	Lommy Billader 12/24V Billader 12/24V Lommy		2223270
222718	Knop EPI 900S Føler for EPI 900		2223274
222718	Knop RX 900-2RE Mottaker 2 kanaler med 2 releutganger.		2223282
222718	Knop TX 900-6 Sender med 6,3mm Jack		2223289
222718	Knop SD 900 Røykvarsler med Knop radiosender		2223292
222718	Knop BW 900S Fuktføler Seng laken		2223295
222718	Knop ekstern følerledning BW900/2009L		2223296
222718	Knop MI 825 Mikrofon for LAK 821/900/900 Audio	136042	2223467
222718	Knop ST 825 Strømforsyning 5V DC	175450	2223476
222718	Knop ST 765 Strømforsyning 12VDC		2223479
222718	Knop ST 762-B Strømforsyning 15V DC		2223480
222718	Knop ST 8312 Strømforsyning 12V DC		2223482
222718	Visonic WT 301	135564	2223530
222790	Elliot Sender smykke/armbånd		2227061



