



# BRUKSANVISNING

## TIMSTOCK

### 119622-00

**CANTEC**

- helping people

#### **GENERELT**

Batteridrevet tidshjelpemiddel for innendørs bruk i tørre områder. Leveransen inkluderer klistremerker i farger som tilsvarer startknappene. Klistrelappene kan brukes til å fargemerke aktivitetsbilder eller tidsplaner. Hvis en aktivitet for eksempel skal vare i 10 minutter, merk den med et grønt klistremerke.

#### **FUNKSJON**

Nedtellingstid fra 20, 15, 10 eller 5 minutter.

Nedtellingens vises med LED-kolonnen.

Ved oppstart lyser: 20 lysdioder for 20 minutter

15 lysdioder for 15 minutter

10 lysdioder for 10 minutter

5 lysdioder for 5 minutter

Deretter slukker en diode hvert minutt, frem til alle har slukket. Ved slutten av telleperioden blinker alle lysdioder og ett kort pipe fem ganger. Pågående signalering kan avbrytes ved å trykke på en av knappene.

#### **SLIK GJØR DU:**

Trykk på knappen som tilsvarer ønsket tid.

LED-ene lyser tilsvarende tiden som startknappen representerer og nedtellingens starter.

Starttidspunktet kan slettes med rød og blå startknapp trykkes og holdes nede samtidig i 2 sekunder. Deretter kan en ny nedtelling.

På kortsiden av enheten er det et volumhjul for endring av lydsignal. Når hjulet er i min-posisjon, er lyden helt dempet og signalering skjer kun ved å blinke LED-ene.

#### **BATTERI**

Leveransen inkluderer to 1,5V batterier type R6.

Disse er nok til ca 60 timers bruk. Når lysstyrken på LED-ene begynner å synke, må begge batteriene skiftes.

Batteridekselet låses med en skrue (rettspor).

Om ønskelig kan oppladbare batterier av type NiMH størrelse R6 brukes. Disse lades med en spesiell lader. (Denne typen batteri og lader er ikke levert av Westerstrand)

#### **Rengjøring / Rekondisjonering / Testing av signalvolum**

Tørk av enheten med en lett fuktig og lofri klut med vanlig såpe eller rensklut beregnet for elektronikk.


Bytt batterier om nødvendig. Ved behov kan et nytt frontdekal limes på stokken.

For å teste volumnivået til lydsignalet, trykk på to midtknapper samtidig. Testfunksjonen slås av ved å trykke på en knapp.



#### **TILBEHØR:**

119607-00 Halsbånd

119608-00 Beskyttelsesveske

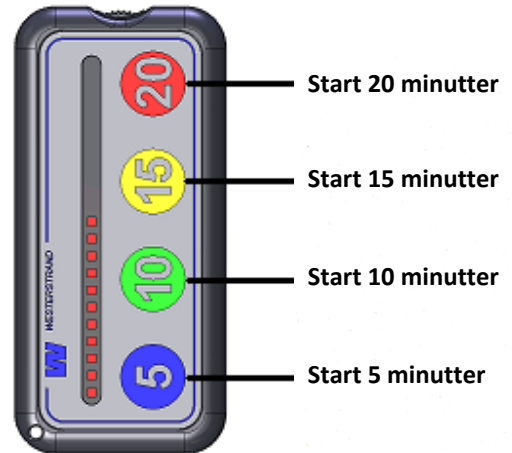

Batterilukens låseskrue

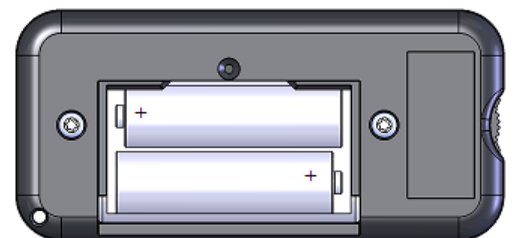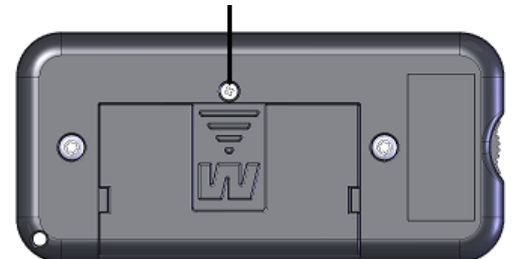

Dimensjoner: 111x52x27 mm. Vekt 115 g.