

Forbedringer i bokhyllenavigasjon:

- Du kan nå skjule apper (bokhyller) i Online bokhyllen som du ikke bruker (f.eks. referanser, Internett-radio, TuneIn radio og podkaster). Disse vil ikke lenger vises i rotasjonen. Merk at du ikke kan skjule apper som må konfigureres med en konto (for eksempel Tibi, Bookshare og NLS BARD). For å skjule disse, slett kontoen.
- Det finnes nå to forskjellige måter å navigere i bokhyller på: rotasjon (trykk 1 til du kommer til bokhyllen du vil ha), som er det du kjenner til, og en ny LISTE-MODUS. I LISTE-modus (som er deaktivert som standard) vil trykk på tast 1 åpne en liste over bokhyller som kan navigeres med 4 og 6.

Forbedringer i podkaster:

- Hver podkaststrøm kan konfigureres separat for hvor mange episoder som skal beholdes
- Du kan konfigurere frekvensen for oppdateringer for alle feeds (pleide å være 30 minutter, kan nå konfigureres)
- Noen ytelsesforbedringer under panseret ble gjort for podkastene

Nedlastingsbehandler

- Et langt trykk på 3-tasten lar deg få tilgang til nedlastingsbehandleren, hvor du kan avbryte og omprioritere nedlastinger for alle apper samtidig

Varia:

- M4B-filer kan navigeres etter kapitler hvis de er riktig markert
- Langt trykk på 9-tasten vil åpne lagrede Bluetooth-enheter for å koble raskere til
- Støtte for eBRF-filer
- Mine tildelte bøker i Bookshare støttes nå
- Ikke-latinske og aksenterte tegn aksepteres nå i SSID-er (merk: dette vil fortsatt ikke fikse apostrofen som er inkludert i iPhonens hotspot-navn, som vil bli undersøkt i en fremtidig versjon)

- Du kan nå kopiere alle notatene samtidig
- .3gp notatfiler (fra eldre Stream) kan nå spilles av
- Hviletid som tidligere var 30 minutter, er nå konfigurierbar
- Bluetooth-kontroller er nå aktivert. Spill, spol frem og tilbake fra Bluetooth-hodesett/høyttalere som støtter AVRCP. Merk at dette er den første versjonen, derfor kan noen enheter fungere bedre enn andre.
- Å koble til et Bluetooth-tastatur lar deg skrive inn tekst med det tastaturet i tekstfeltene (SSID, søk osv.). Kun det amerikanske tastaturet QWERTY støttes – flere konfigurasjoner vil bli lagt til i fremtidige versjoner.

FEILRETTINGER

- Podkastbeskrivelser og Bookshare-bokbeskrivelser bør ikke lenger inkludere HTML
- Bokmerker i podkaster skal ikke lenger gå tapt etter at episoder er flyttet
- Fikset et problem ved flytting av flere podkastfiler samtidig
- Fikset et problem med punktskriftbøker på BARD
- Løste noen problemer der konfigurasjonsfiler (f.eks. Wi-Fi eller en konto til en tjeneste) noen ganger ble korrupt og forsvant fra enheten
- Fikset et problem der Internett-radiofavoritter kom tilbake av seg selv etter en omstart
- Fikset et problem som gjorde at 30-minutters hviletid for nedstengning noen ganger ikke ble utført
- Fikset noen problemer med visse TuneIn-favoritter som ikke vises på Stream
- Fikset et problem der HTML-filer noen ganger ikke lastet inn
- Forbedrede tidsannonser på tysk
- Fiksede tegnsettingsproblemer på svensk

For ytterligere informasjon henvises det til brukerhåndboken til Victor Stream 3. Denne kan åpnes og lukkes med langt trykk på tallet 1 eller lastes ned fra www.cantec.no