



# Bernafon App

- Hvordan bruke appen
- Aktivere TV-adapter
- Hvordan pare høreapparatene med telefonen

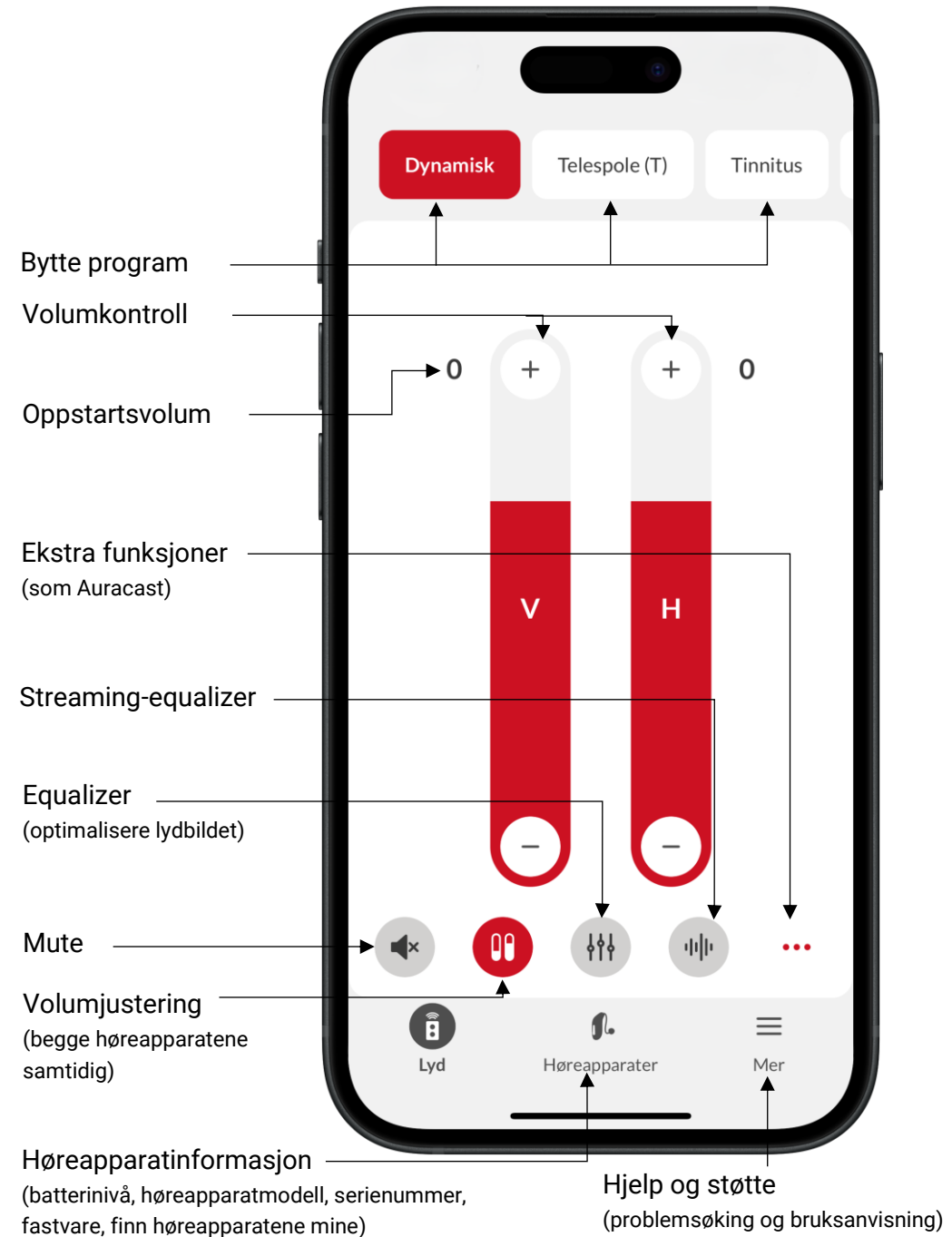



1. Sveip program-linja mot venstre
2. Trykk på TV-A
  - Du vil høre en bekreftelsesmelodi i høreapparatene når du velger TV-A programmet.

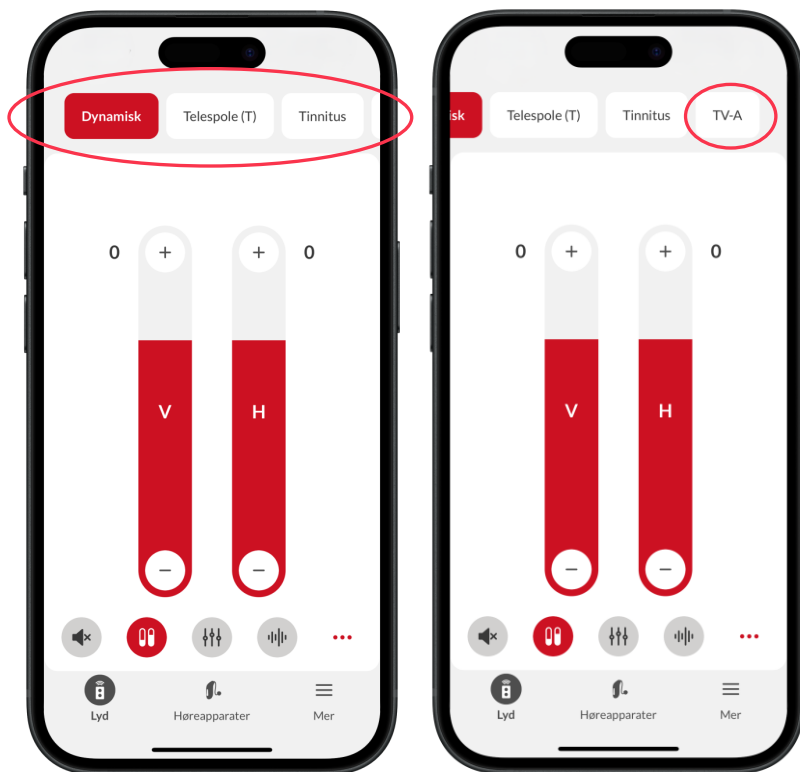

Dersom TV-A programmet ikke er listet opp i programlisten, betyr det at høreapparatene ikke er paret med TV-A.

(Se egen bruksanvisning for TV-A)

### Android versjon 8 eller nyere

Pass på at høreapparatene har strøm og at Bluetooth er aktivert før du setter i gang.

1. Åpne Bernafon app og gi nødvendige tillatelser
2. Start høreapparatene på nytt\*
3. Appen oppdager høreapparatene dine
4. Forsikre deg om at riktige høreapparater er funnet – trykk **JA**
5. En meldingsboks vil dukke opp som spør om du ønsker å koble sammen – trykk **Koble sammen**, én gang pr. apparat.
6. Høreapparatene er nå koblet til din telefon – trykk **Fortsett**.

Dersom ett høreapparat er koblet fra appen, trykk på **Høreapparater** nederst på skjermen. Deretter trykk **Koble sammen nye høreapparater** og gjenta tilkoblingsprosedyren.

\* Start apparatene på nytt

**Oppladbare høreapparater:** Sett apparatene i laderen i 5 sekunder. Apparatene skrus automatisk på igjen når de tas ut av laderen.

**Høreapparater med batteri:** Åpne og lukk batterilukene.