

Hvordan koble til en Auracast™-sending

Auracast™ er en ny trådløs lydteknologi basert på Bluetooth® LE Audio som muliggjør lydstrømming til flere enheter samtidig. I motsetning til tradisjonell Bluetooth, som krever sammenkobling mellom enheter, lar Auracast brukere lytte til delte lydstrømmer – som kunngjøringer på en flyplass, teater, musikk med venner eller lyd fra en konferanse, uten å sammenkoble enheter.

Denne guiden forklarer hvordan du kobler enheten din til en Auracast-sending enten ved hjelp av Bernafon App eller for Android-enheter med Bluetooth LE Audio; via innstillingene.

Kompatibilitet

Bernafon høreapparater med Bluetooth® LE Audio er kompatible med Auracast.

Høreapparatmodeller	Nødvendig fastvare
Bernafon Encanta miniBTE	1.3.0 eller nyere
Bernafon Encanta miniRITE	1.3.0 eller nyere

For detaljer om kompatibilitet, besøk bernafon.com/compatibility


Før du begynner

1. Sørg for at Bluetooth er slått på.
Gå til: **Innstillinger > Bluetooth**, og sjekk at Bluetooth er skrudd på.
2. Sørg for at høreapparatene dine er sammenkoblet med telefonen.
3. Last ned Bernafon App ved hjelp av QR-koden nedenfor og følg instruksjonene for å koble høreapparatene dine til enheten din.



Hvordan koble til en Auracast-sending med Bernafon App

Det er to måter du kan koble til en Auracast-sending ved hjelp av Bernafon App:

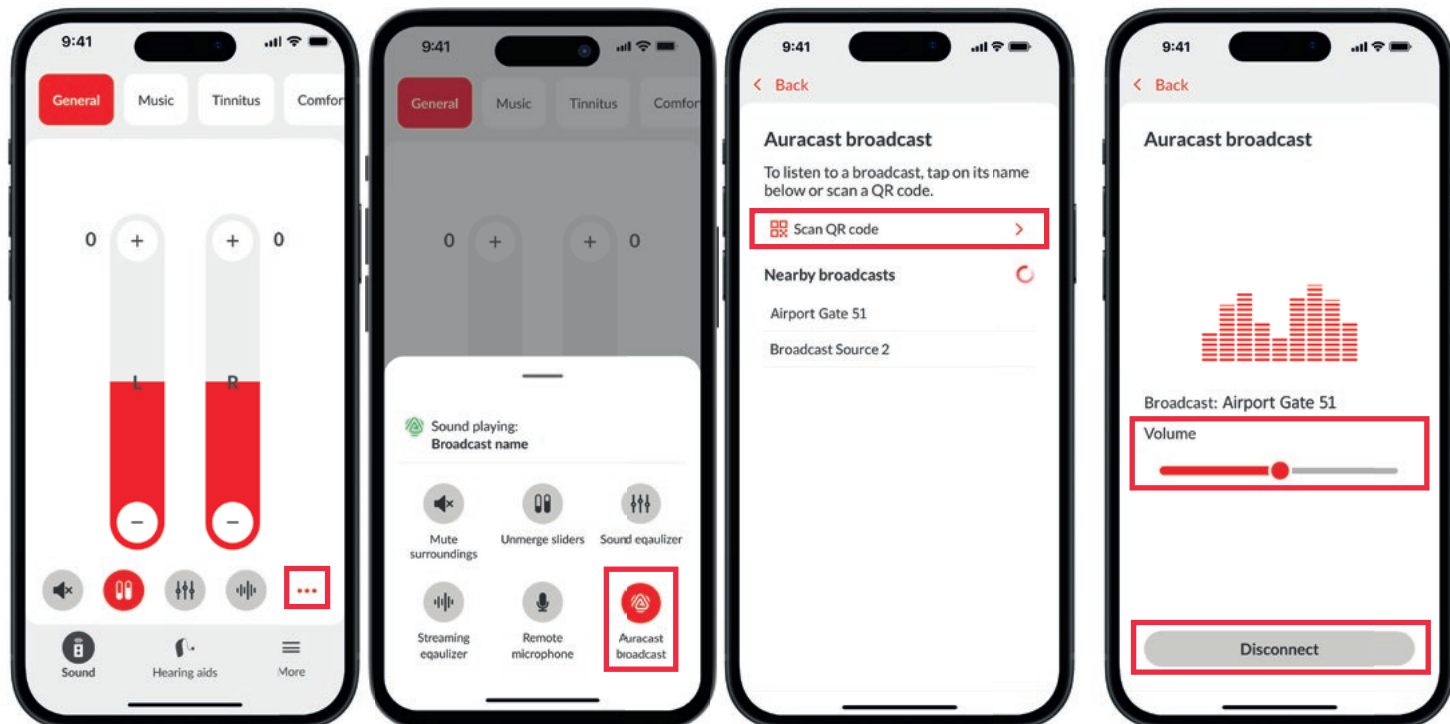

Alternativ 1: Skann en QR-kode


1. På fanelinjen trykker du på **Lyd**.
2. Trykk på de tre prikkene (...) for å vise flere valg.
3. Trykk på Auracast-sendingknappen.
4. På skjermen for Auracast-sending trykker du på **Skann QR-kode**.
5. Pek telefonens kamera mot **Auracast QR-koden** som vises på for eksempel en skjerm eller et skilt. Sendinger kan være offentlige eller private. Trykk på den valgte sendingen (presentert med navn). Hvis sendingen er passordbeskyttet, skriv inn riktig passord.
6. Når sendingen er oppdaget, trykker du **Bli med** for å starte strømming av lyd direkte til høreapparatene dine.

7. Bruk glidebryteren for å justere volumet.

Slik kobler du fra

For å stoppe sendingen:

1. Trykk på **Koble fra** i appen.
2. Eller trykk og hold trykknappen nede på høreapparatet i 2-3 sekunder, eller plasser høreapparatet i laderen.

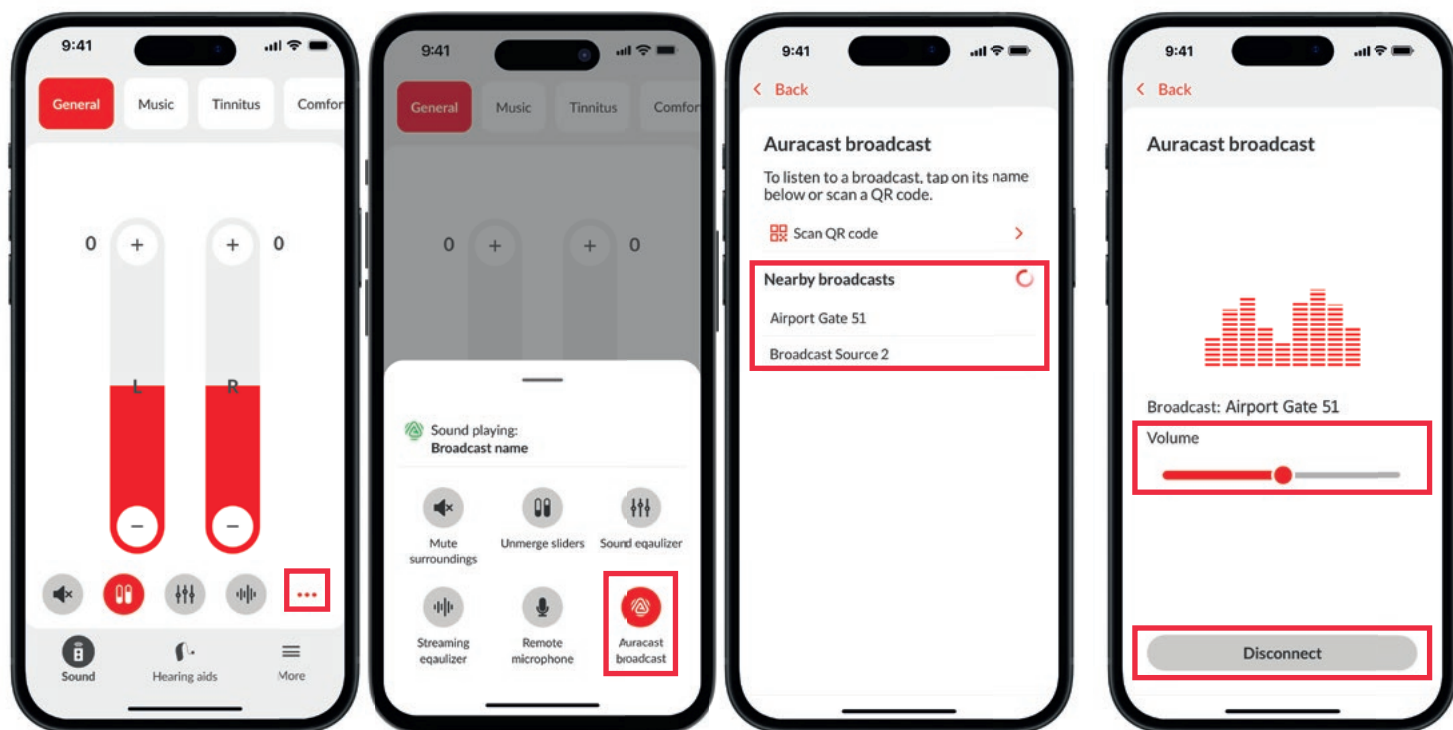

Alternativ 2: Manuelt valg fra tilgjengelige sendinger

1. På fanelinjen trykker du på **Lyd**.
2. Trykk på de tre prikkene (...) for å vise flere valg.
3. Trykk på Auracast-sendingknappen.
4. På skjermen for Auracast-sending under **Sendinger i nærheten**, vises en liste over tilgjengelige sendinger. Sendinger kan være offentlige eller private.
Trykk på den valgte sendingen (presentert med navn). Hvis sendingen er passordbeskyttet, skriv inn riktig passord.
5. Trykk på sendingen du vil bli med i.
6. Trykk på **Bli med** for å starte strømming.

7. Bruk glidebryteren for å justere volumet.

Slik kobler du fra


For å stoppe sendingen:

1. Trykk på **Koble fra** i appen.
2. Eller trykk og hold trykknappen nede på høreapparatet i 2-3 sekunder, eller plasser høreapparatet i laderen.

Slik kobler du til en Auracast-sending via innstillinger på enheter med Bluetooth LE Audio

Auracast fungerer på utvalgte Android-enheter med Bluetooth LE Audio som har Android 15 eller nyere. For detaljer besøk bernafon.global/compatibility

Viktig: Telefonprodusenter kan referere til Auracast-sendinger med forskjellige navn; denne guiden bruker begrepet **lydstrøm** for resten av guiden. Skjermbildene som er inkludert er tatt fra en Google Pixel 9, andre telefoner kan vise Auracast-menyer annerledes.

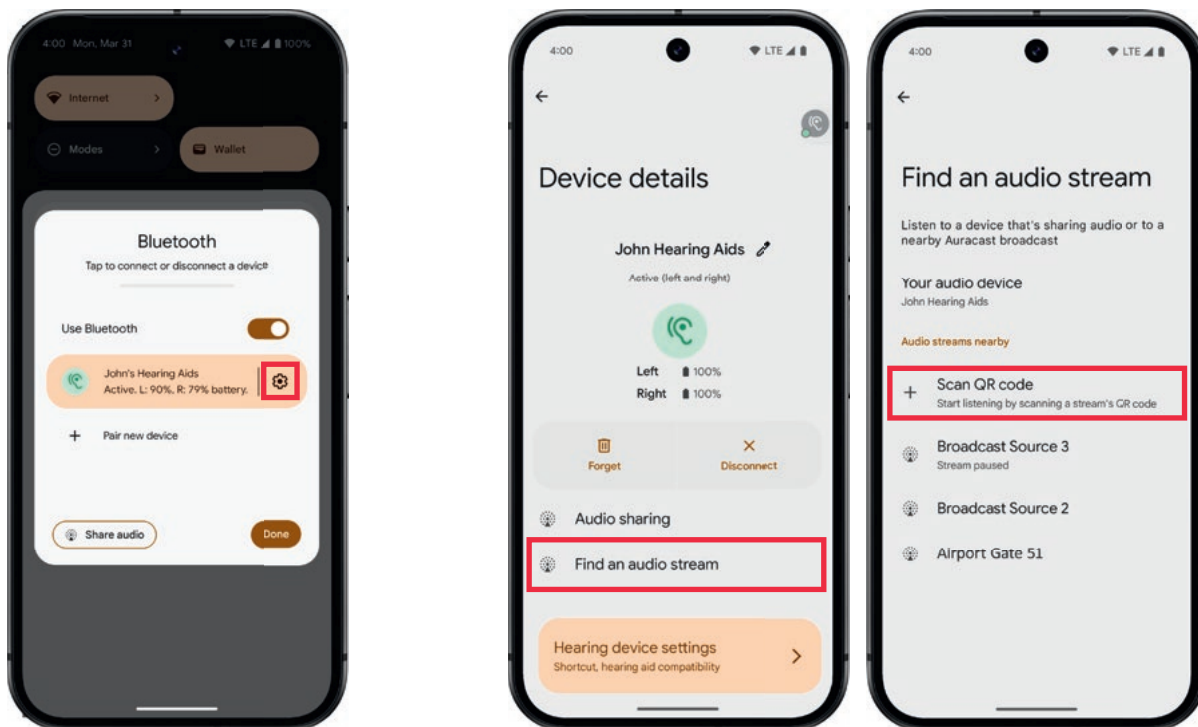


Slik kommer du i gang

1. Når høreapparatene er koblet til via Bluetooth, sveip ned fra startskjermen for å finne **Bluetooth innstillinger**.
2. Trykk på **Bluetooth-enheten** med navnet på høreapparatene dine > Trykk på tannhjulet for å gå inn i **Enhetsdetaljer**.

Det er to måter du kan koble til en Auracast-sending via innstillinger.

Alternativ 1: Skann en QR-kode

1. Trykk **Finn en lydstrøm**
2. I **Finn en lydstrøm** > trykk på **Skann QR-kode**. En QR-kode leveres av kringkastingsverten som du kan skanne for å bli med i en sending. Sendinger kan være offentlige eller private. Trykk på den valgte sendingen (presentert med navn). Hvis sendingen er passordbeskyttet, skriv inn riktig passord.
3. **Skann QR-kode**> bruk enhetens kamera til å skanne QR-koden.
4. Når du er koblet til vil telefonen vise **Lytter nå** eller **Strøm midlertidig stanset** avhengig av statusen til sendingen.

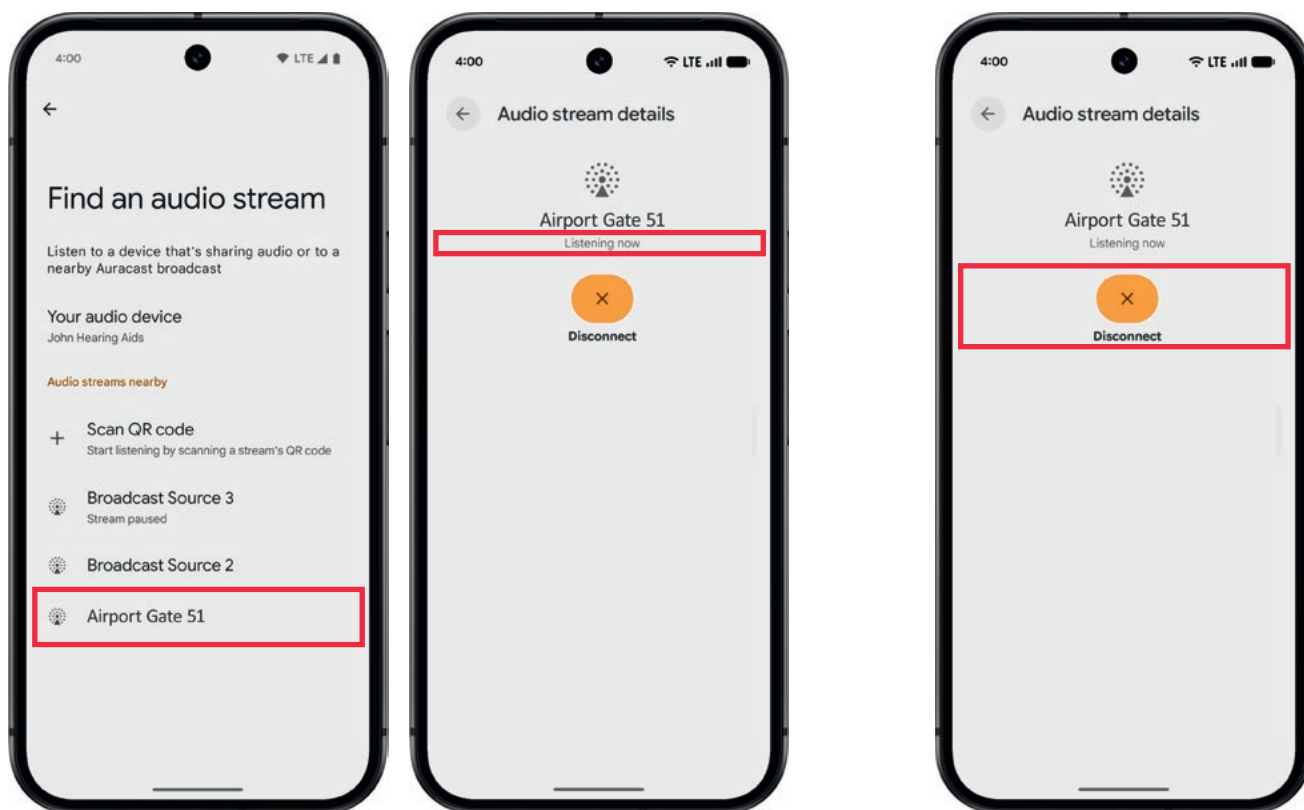

Alternativ 2: Manuelt bli med i en sending

1. Trykk på **Finn en lydstrøm** > **Lydstrømmer i nærheten**. Her kan du se en liste over sendinger som er tilgjengelige.
2. Trykk på den valgte sendingen (presentert med navn). Hvis sendingen er passordbeskyttet, skriv inn riktig passord.
3. Vent på bekreftesskjermen. Når du er koblet til vil telefonen vise **Lytter nå** eller **Strøm midlertidig stanset** avhengig av om lydsendingen er aktiv for øyeblikket.

Slik kobler du fra en sending

1. For å avslutte tilkoblingen til en sending, sveip ned og trykk på Koble fra i Lydstrøm-varslingen, eller:
2. I **Detaljer for lydstrøm** > trykk på **Koble fra** for å avslutte høreapparatets tilkobling til sendingen. Tilkoblingen din skal nå være **frakoblet**.

Hvis du ikke klarer å koble til eller finne en Auracast-sending, vennligst gå til feilsøkingsdelen bakerst i denne guiden.

Feilsøking

Vær oppmerksom på at Auracast-sendingsslyd er en ny og fremvoksende teknologi som fortsatt er under utvikling og utrulling globalt på tvers av enheter og produsenter. Derfor kan du oppleve problemer med sendingen du prøver å koble til.

Du kan prøve å løse vanlige tilkoblingsproblemer med høreapparatene eller Android-enheten ved å følge disse trinnene når du kobler til en sending:

1. Kan ikke finne noen lydstrøm eller sending

Sørg for at **Stedstjenester** er slått på.
Gå til **Innstillinger > Sted** og sørg for at stedsinnstillingen er aktivert. Lyddeling krever stedstilgang for å oppdage nærliggende sendinger.

2. Kan ikke bli med eller koble til en sending:

Hvis en sending er synlig, men du ikke klarer å koble til, sjekk om sendingen aktivt spiller av lyd. Hvis sendingen du prøver å koble til ikke kringkaster aktivt vil ikke enheten din kunne koble til.

3. Start Bluetooth på nytt: Du kan fikse vanlige tilkoblingsproblemer mens du lytter til en sending. Sveip ned og trykk på Bluetooth-innstillinger, eller prøv å starte høreapparatene på nytt.

Apple, the Apple logo, iPhone, og iPad er trademarks av Apple Inc., registrert i U.S. og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc. Android™, Google Play og Google Play logo er varemerker som tilhører Google LLC. Bluetooth®-merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-merket og logoene er varemerker som eies av Bluetooth SIG. All bruk av slike merker av Demant skjer under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

