

Bernafon Encanta

# Nyhetsbrev

april 2024



Bernafon

## Encanta miniRITE

Vi lanserer nå et helt nytt høreapparat med et nytt design. Encanta miniRITE er elegant og ergonomisk – med en ny stil som er både mindre og mer diskret.

Det nye høreapparatet byr bl.a. på:

- Et nytt hurtigladende batteri
- Tap Control for praktisk håndtering av telefonsamtaler
- Nye miniFit lydgivere
- LE Audio
- Telespole
- Smart sensor



Bernafon Encanta er et miniRITE (MNR) oppladbart høreapparat designet for brukere med lett til alvorlig hørselstap. Det inkluderer LE Audio og Bluetooth® Low Energy og støtter hands-free kommunikasjon og direkte streaming for iPhone, iPad, Mac og utvalgte Android™-enheter.

Encanta støtter bl.a. hurtiglading slik at én time lading gir nok strøm til en hel dags bruk. I tillegg kan man nå benytte Tap Control for enkelt å svare på telefonsamtaler.

Smart Sensor er en bevegelsessensor som automatisk justerer nivået av retningsbestemmelse og støyreduksjon basert på høreapparatbrukerens hode- og kroppsbevegelser. Når brukeren er fokusert på én person i en gruppesamtale, øker Smart Sensor retningsvirkningen og støyreduksjonen, og hjelper dem med å fokusere på personen de snakker med. Når brukeren beveger hodet fra venstre til høyre for å følge en gruppesamtale, skifter systemet automatisk til en mer 360 graders bevissthet og reduserer støyreduksjonen. Dette lar brukeren være mer bevisst på hele miljøet rundt dem.

Encanta er på kontrakt fra 17. april, og kan nå bestilles i vår [nettbutikk](#).

## Encanta fargeutvalg

Bernafon Encanta miniRITE er tilgjengelig i 8 attraktive farger:



## MiniFit Detect lydgivere

MiniFit Detect kommer med flere fordeler.

Først av alt har miniFit Detect en ny 8-pins kontakt med innebygd minne. Dette minnet identifiserer serienummer, tilpasningsnivå, lengde og side (høyre/venstre) – som kan identifiseres av Bernafon OasisNXT for å sikre at riktig lyd giver settes på.

Sensitivetsinformasjon identifiseres også i 24 bånd, noe som betyr at lyd giveren har en innebygd selvkalibreringsfunksjon. Hver enkelt lyd giver måles under produksjon, og disse dataene lagres for å kompensere for eventuelle avvik og sikrer en presis tilpasning.

Den nye lyd giveren inkluderer også en feilmodus som er en sikkerhetsfunksjon. Hvis et høreapparat er programmert for høyre øre og en venstre lyd giver settes på ved en feiltakelse, vil høreapparatet bli stumt og LED-lyset vil gi 4 lange oransje blink (1 sek lang) 4 ganger. Det samme varselet vil vise seg hvis feil tilpasningsnivå på lyd giveren monteres.

MiniFit Detect-lyd giveren er kun kompatibel med Bernafon Encanta høreapparater. Tilpasningsnivå 60 og 85 er tilgjengelig i lengde 0-5, mens tilpasningsnivå 100/105 er tilgjengelig i lengde 1-5.

Eksisterende miniFit domer kan også benyttes på de nye miniFit Detect-lyd giverne. Husk også at lyd givere som byttes på service/oppfølgingstimer skal føres opp på et lyd giverskjema som dere finner [her](#).



## Ny ladestasjon

Encanta kommer med en ny lader, designet med pålitelighet, brukervennlighet og klinisk effektivitet i tankene.

Den nye laderen bruker kontaktlading, som gir brukerne dine en hel dag med strøm på bare én time samt muligheten for en rask hurtiglading på bare 15 minutter.

Kontaktlading betyr raskere lading, en mindre ladeenhet og en mer pålitelig ladeopplevelse for brukerne.

Kontaktpunktene på høreapparatene skraper mot fjærene i ladepunktet på laderen når apparatene settes til lading. Dette betyr at smuss eller støv blir fjernet fra kontaktpunktene før lading, og sikrer en sikker lading. Høreapparatene kan programmeres mens de står i laderen. Denne funksjonen gir deg en mer effektiv klinikkopplevelse de gangene brukere kommer til en time med lavt batterinivå eller når det er behov for en firmware-oppdatering.



## OASIS<sup>nxt</sup> 2024.1

Den nye versjonen av Oasis<sup>NXT</sup> støtter den nye Encanta høreapparatfamilien og kan lastes ned [her](#). Versjon 2024.1 inkluderer følgende nye funksjoner:

**miniFit Detect:** Encanta kommer med en ny smart lyd giver kalt miniFit Detect. Denne lyd giveren lar Oasis<sup>NXT</sup> lese informasjon som tilpasningsnivå, lengde, side og serienummer.

**Tap Call-kontroll:** Bernafon Encanta støtter Tap Call-kontroll, som lar brukeren godta eller avvise en samtale ved å trykke på øret. Dette er aktivert som standard og kan konfigureres i tilpasningsprogramvaren.

**Audible Contrast Threshold:** I Oasis<sup>NXT</sup> 2024.1 er det mulig å importere eller manuelt legge inn en ACT<sup>TM</sup>-verdi som vil påvirke beregningen av støybegrenser-funksjoner i Alpha XT og Encanta høreapparater.

**Tilpasning mens høreapparatet lader:** Med Encanta høreapparater er det mulig å gjennomføre tilpasningen mens høreapparatene står i laderen.

**Veiledning for plassering av probeslange:** For REMfit vil en veiledning for plassering av probeslange være tilgjengelig ved bruk av IMC2-kompatible REM-systemer. Denne veiledningen kan hjelpe med å plassere probeslangen optimalt, for en mer presis måling.

**Smart Sensor:** I tilpasningsprogramvaren er det mulig å slå Smart Sensor av og på. Smart Sensor vil være på som standard og er tilgjengelig for Encanta.

**Smart Noise Management:** I den nye Smart Noise Management-skjermen er en "Veldig høy"-innstilling lagt til, noe som gir opptil 12 dB støyreduksjon.


**Datalogging:** Det er mulig å få mer presis informasjon om faktisk brukstid i datalogging, da sensorer gir informasjon om når høreapparatene faktisk bæres på ørene.

## Oppdatert Bernafon app



Bernafon app er nå oppdatert til versjon 1.3.0. og er tilgjengelig for nedlastning i App Store og Google Play.

Nytt i versjon 1.3.0 er bl.a. muligheten for å sjekke om høreapparatene lader/er ferdig ladet, samt aktivere eller deaktivere Tap Control.

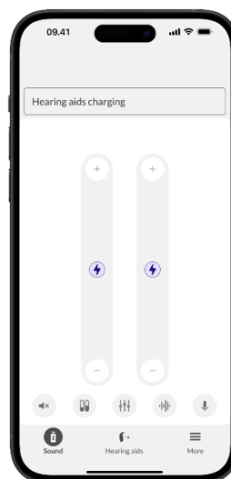

## Tilbehør

Det nye Encanta høreapparatet kan kobles trådløst til et bredt spekter av enheter:

- SoundClip-A
- TV-A (TV-adapter)
- RC-A (fjernkontroll)
- EduMic



### SoundClip-A

SoundClip-A er en liten allrounder.

Kan kobles til alle smarttelefoner for handsfree telefonsamtaler, eller brukes som en ekstern mikrofon for å forbedre kommunikasjonen over avstander på opptil 20 meter.



### TV-adapter

TV-A lar deg streamme TV-underholdning inn i høreapparatene dine i stereo lyd kvalitet.



### Fjernkontroll

RC-A er en fjernkontroll med utmerket brukervennlighet. Bruk den til å endre program og volum på høreapparatene dine enkelt og diskret.



### EduMic

Bruk EduMic som en ekstern mikrofon eller for å streamme lyd fra datamaskiner, nettbrett osv.