

Nyhetsbrev

august 2023



Hybrid Technology™
tatt til neste nivå



bernafon®
Your hearing · Our passion

Bernafon app - nå med Lyd-equalizer



En oppdatering av Bernafon app er nå tilgjengelig for både iOS og Android. **Versjon 1.2.0** inneholder flere nye egenskaper, som bl.a.:

- Lyd-equalizer
- Høreapparat-oppdateringer via app
- Husk voluminnstillinger
- HearingCoach

Lyd-equalizer er en funksjon som har vært etterspurt i lengre tid, og nå kan vi endelig tilby dette. Lyd-equalizer muliggjør at brukeren selv kan finjustere på lydbildet ved å justere i de 3 frekvensbåndene Lav, Mid og Høy.

Ved jevne mellomrom slippes det firmware-oppdateringer til våre Bernafon høreapparater. **Oppdatering av høreapparater** har tidligere kun vært mulig å gjøre hos audiograf. Versjon 1.2.0 av Bernafon app tillater brukeren selv å oppdatere høreapparatene ved fremtidige mindre firmware-oppdateringer.


Husk voluminnstillinger sørger for at eventuelle volumjusteringer brukeren gjør i de individuelle lytteprogrammene forblir lagret til neste gang brukeren aktiverer programmet. Eksempel; dersom man øker volumet med 2 dB i program 1, vil det være denne voluminnstillingen som er gjeldende i program 1 også neste gang man aktiverer programmet (etter at apparatene har vært avslått, til lading eller andre program er blitt benyttet). Funksjonen må aktiveres i Bernafon app eller i OasisNXT.

HearingCoach gir brukeren en oversikt over hvor mye han/hun har brukt høreapparatene, samt muligheten til å sette seg mål for hvor mye de skal bruke høreapparatene. Brukerne vil kunne se oversikt som viser om målene er blitt nådd pr. dag, uke, måned eller år.

Det er også utført små endringer på funksjonene "Finn høreapparatet mitt" og Feilsøking.

Dersom du ønsker kan du se en video som viser de nye funksjonene. Videoen finner du [her](#).

Alle de nye funksjonene beskrevet ovenfor er kun kompatibel med Bernafon Alpha XT høreapparater med firmware-versjon 1.1.0., unntatt funksjonen "Oppdatering av høreapparater" som også er kompatibel med Bernafon Alpha med siste firmware.

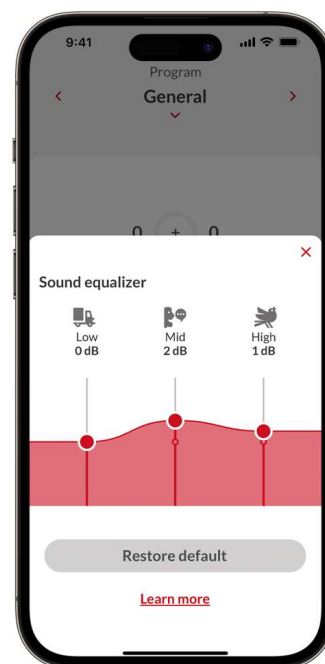


Oasis^{NXT} 2023.2

En oppdatering av Oasis^{NXT} er nå tilgjengelig. Versjon 2023.2 inneholder ny firmware til våre høreapparater, samt funksjons- og sikkerhetsoppdateringer. Oasis^{NXT} 2023.2 kreves for å kunne tilkoble Alpha XT høreapparater som innehar vår nyeste firmware-versjon (1.1.0.).

For å oppdatere til versjon 2023.2, velg en av følgende:

1. Oppdater ved hjelp av Oasis Updater
2. Be om å få tilsendt Oasis^{NXT} på USB minnepenn
3. Last ned fra vår server. Installasjonsfila finner du [her](#). Trykk deretter "Download" øverst i venstre hjørne, og pakk ut filene før du installerer.

Ta kontakt med oss i Cantec dersom du trenger hjelp til installeringen.

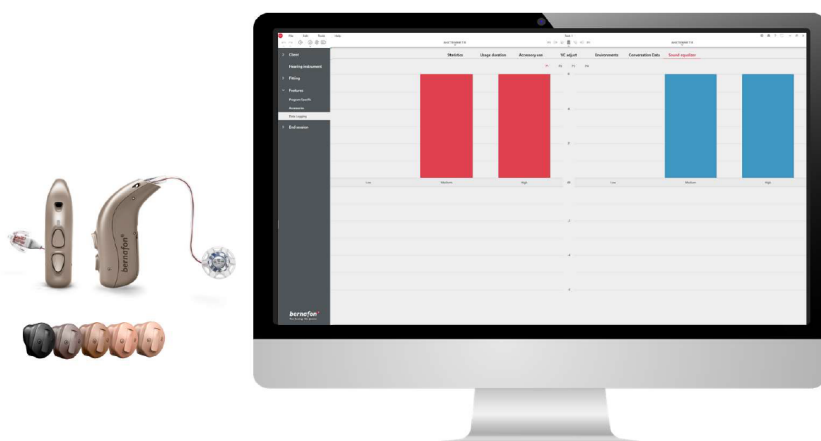

Alpha XT 9 høreapparater

Har du ikke testet ut Bernafon Alpha XT enda? Ta kontakt med oss i Cantec så kommer vi gjerne på besøk for å vise hvordan vår unike Hybrid Technology virker, og hvilke fordeler den gir høreapparatbrukerne.

