

Topolino Capo



Les og jobb med fullHD bildekvalitet



Topolino Capo skiller seg ut på grunn av den store avstanden mellom kamera og leseområde. Den utmerkede dybdeskarpheten gjør at objekter kan forstørres og vises tydelig. Minimum forstørrelse starter på 1,2x (avhengig av størrelsen på skjermen). Tekster på størrelse med en A3-side kan vises komplett i høy kontrast.

Topolino Capo anbefales sterkt til personer med RP (liten forstørrelse i fullHD bildekvalitet) samt for folk med MD (høy forstørrelse med utmerket kontrast).

Topolino Capo kan kobles til en VGA-skjerm eller en PC/laptop og passer inn på ethvert kontor fordi den ikke tar mye plass. Med bare ett fullHD kamera er det mulig med både lesing og avstandsvisning med en fortreffelig bildekvalitet. De siste innstillingene (forstørrelse og farge) vil alltid bli lagret og husket.

På grunn av enkel foldemekanisme, lett vekt og batteridrift, kan Topolino Capo enkelt fraktes i bæresesken som følger med. Det er også enkelt for brukeren å skifte batteri selv.

Dine fordeler

- ▶ fullHD bildekvalitet
- ▶ bedre belysning for en A3-side
- ▶ enkel å bære, lett å installere, enkel å betjene
- ▶ kan kobles enten til en VGA-skjerm eller PC/laptop
- ▶ for mer komfortabel lesing benyttes XY-bordet

Topolino Capo



Tekniske data



LVHD 60-85 Hz kamera, progressiv scanning
lesesystem: opp til 1920 x 1080 pixels



autofokus
som kan slås på/av



ca. 1,2x - 85x avhengig av skjerm



USB-utgang
VGA-utgang



oppladbart, lithium-ion batteri
driftstid: ca. 2 timer
ladetid: ca. 4 timer



lyset kan dimmes
"split-screen" funksjon
leselinje
gardin-funksjon



fullfarge gjengivelse
artifisielle farger: **F F F F F F**
en brukerdefinert semifarge fra
8 forskjellige justerbare farger




vekt: ca. 3,9 kg
mål oppreist(BxHxD):39 x 49 x 49 cm
mål sammenfoldet:31 x 15.5 x 46 cm




Leveres som standard:
komfortabelt XY-bord med integrert låsesystem
mobilitetspakke (består av oppladbart batteri og bæreseske)



kontoutdrag, bøker, foto,
kataloger, aviser, flipover

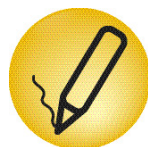

bankgiro, kryssord, brev

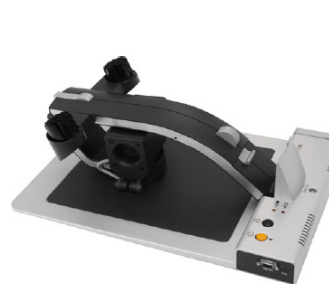

plassbesparende



enkelt å bytte batteri

Gewa AS
Trollåsveien 8
Postboks 626
N-1411 KOLBOTN

Telefon: (+47) 66 99 60 00
Telefaks: (+47) 66 80 94 90
E-post: gewa@gewa.no
Hjemmeside: www.gewa.no