

TX-2004 sender – Knop

# Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning

---

**GEWA**

- helping people

## TX-2004 sender – Knop



TX-2004 sender - Knop: HMS art. nr.: 020732 Best. nr.: 2223231

### INNHOLD

TX-2004 sender – Knop .....	1
TX-2004 sender – Knop .....	1
Generelt om TX-2004 .....	2
Innstilling av Dip-switch .....	2
Batteri .....	2
Trådløs overføring .....	2
Tekniske data .....	2

---

**GEWA AS**

Postboks 626, 1411 KOLBOTN  
Besøksadresse: Trollåsveien 8  
Telefon: 66 99 60 00  
Telefax: 66 80 94 90  
Teksttelefon: 66 80 93 90  
E-post: [gewa@gewa.no](mailto:gewa@gewa.no)  
Website: [www.gewa.no](http://www.gewa.no)

## Generelt om TX-2004

TX-2004 er en hendig 1-kanals sender med stor rekkevidde. Rekkevidden er normalt 50 meter, men da dette er en radiosender begrenses rekkevidden av betongvegger og lignende.

Et trykk på den grønne knappen og senderen sender signal til valgt mottaker. Lysdioden (rød) lyser når senderen sender, og er en bekreftelse på at senderen fungerer.

TX-2004 har også en separat inngang (3,5mm minijack) for tilkopling av for eksempel brytere, tråkkematter og trykksalarmer.

## Innstilling av Dip-switch

Systemkode. Inne i TX-2004 finnes en Dip-switch med 8 brytere som kan stilles i ON eller OFF posisjon. Ved levering er TX-2004 kodet 1-8, det vil si at Dip-switchen 1 og 8 er satt i stilling ON (de øvrige i stilling OFF). TX-2004 vil reagere på alle sendere som har samme kode og kanal. Test av mottaker og sendere bør skje med jevne mellomrom

## Batteri

Løsne skruen til batteriboksen på mottakerens bakside og ta ut de brukte batteriene. Sett i to nye batterier av type LR1 1,5V Alkaline. Driftstid er ca. 1 år. NB! Se etter at batteriene er riktig polvendt. Lav batterispennning indikeres ved en konstant tone. (Skift straks batteriene.)

## Trådløs overføring

TX-2004 har en innebygd radiosender som har en rekkevidde på opptil 50 meter. TX-2004 kan sende til nedenforstående mottakeranordninger:

- Knop RX-2004 mottaker – Art. nr.: 2223232
- Knop RX-2004 m/reléutgang – Art. nr.: 2223235
- Knop RX-300 – Art. nr.: 2223486

Se separat bruksanvisning for respektive mottakeranordninger.

**Test alltid rekkevidden! Bruk repeater ved behov. Trådløs overføring kan rammes av forstyrrelser. Test derfor regelmessig alle deler i systemet; alarmgivere, sentral, mottakere osv.**

## Tekniske data

Farge:	Sort
Rekkevidde:	50 m i fri sikt
Mål:	44x90x25 mm
Frekvens:	433,92 MHz
System koder:	256 ved dipswitch
Id koder:	10 med dipswitch
Batterier:	Alkaline 1,5V type LR1
Driftstid:	Ca. 1 år
Aktivering:	Trykk på grønt felt
Tilkobling:	Minijack 3,5 mm
Rengjøring:	Fuktig klut og mildt såpevann